

## Alkoholtester Alkosan AL5500



Obj. č.: 84 09 99



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup alkoholtesteru AL5500.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Účel použití

AL5500 je digitální alkoholtester, který měří koncentraci alkoholu v dechu a vypočítá z ní koncentraci alkoholu v krvi.

### Rozsah dodávky

- Alkoholtester AL5500
- 2 baterie typu AA 1,5 V
- 5 originálních náústků přímo od výrobce
- Návod k obsluze
- Baleno v dárkovém balení

### Popis a ovládací prvky



### Vložení baterií

Stiskněte šipku tvořenou tečkami na víčku přihrádky na baterie a víčko sejměte. Do přihrádky vložte 2 baterie typu AA 1,5 V. Dbejte na správnou polaritu. Ta je vyznačena v přihrádce na baterie. Nasuňte víčko přihrádky na baterie zpátky tak, aby se zajistilo. Přihrádku na baterie nezavírejte tím, že byste na víčko zatlačili shora. Tím byste poškodili jazýčky na víčku přihrádky na baterie. Víčko suňte podél pláště přístroje.

### Provádění měření

Krátce stiskněte ovládací tlačítko. Upozornění: Jestliže podržíte ovládací tlačítko stisknuté déle, zobrazí se střídavě počet dosud provedených měření a výsledek posledního měření. V takovém případě spusťte měření alkoholu tím, že ovládací tlačítko uvolníte.

Následuje odpočítávání až do „0“. Upozornění: Odpočítávání trvá déle po prvním zapnutí přístroje. Pokud jste krátce předtím již prováděli měření, bude odpočítávání probíhat rychleji.


Jakmile se na displeji objeví „0“, je alkoholtester připraven k měření.



Jestliže žádné měření neprovedete, přístroj se po krátké době zase vypne (úsporný režim).

Vzorek dechu můžete alkoholtesteru „odevzdat“ třemi způsoby:

- pomocí náústku (nejvyšší přesnost)
- pomocí slámky/brčka (vysoká přesnost)
- vydechnutím vzduchu směrem k otvoru senzoru (dostatečná přesnost)

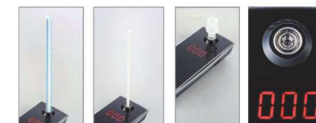

Jakmile alkoholtester rozpozná proud vdechovaného vzduchu, ozve se nepřerušované pípnání a na displeji se zobrazí „0“ pohybující se zleva doprava. Je-li vzorek vdechovaného vzduchu nedostatečný, objeví se na displeji alkoholtesteru nápis „FL0“. Přístroj vypněte a měření zopakujte. Vdechujte se středně velkou silou a bez přerušování. Využijte při tom tlak smršťujících se plic.

Je-li vdechovaný vzorek dostatečný, ozve se dvojitá pípnutí a alkoholtester zobrazí koncentraci alkoholu v krvi ve formátu ### %.

Zobrazení asi 10x zabliká. Poté se při každém bliknutí ozve pípnutí a po dalších pěti zablikáních se alkoholtester vypne.

Chcete-li přístroj vypnout ručně, podržte stisknuté ovládací tlačítko. Na displeji se objeví nápis „OUT“ (vypínání). Po několika sekundách se alkoholtester vypne.

## Zvláštní nápisy na displeji

Zobrazený nápis	Význam	Pokyn
BAT	Vybité baterie	Vložte nové alkalické baterie typu AA 1,5 V.  Nepoužívejte akumulátory.
CAL	Připomínka kalibrace	Odešlete přístroj ke zkalkibrování do společnosti ACE GmbH
SEN	Porucha senzoru	Odešlete přístroj k opravě. Na výměnu senzoru se nevztahuje záruka. Výměna senzoru se provádí za úhradu.

## Takto získáte co možná nejpřesnější výsledek

- Po posledním požití alkoholu vyčkejte nejméně 15 minut, než začnete měřit. Během této doby nejzte, nepijte a nekuřte.
- Neotevírejte plášť přístroje.
- Alkoholtester neuchovávejte na chladných, horkých, vlhkých nebo špatně větraných místech.
- Alkoholtester uchovávejte mimo dosah dětí.
- Po delším uskladnění přístroj nejprve třikrát zapněte a vypněte, než začnete provádět vlastní měření koncentrace alkoholu.
- Dejte pozor, aby alkoholtester neupadl.
- Po upozornění na vybité baterie vyměňte baterie. Snížená kapacita baterií znamená nesprávné výsledky měření.
- Neprovádějte měření na hlučných či špatně větraných místech nebo v průvanu (zvukové vlny ruší senzor).
- Je-li výsledek měření vyšší než 1,00 promile, vyžaduje přístroj ke své regeneraci delší dobu. V takovém případě vyčkejte nejméně 3 minuty, než přikročíte k dalšímu měření.

## Kalibrace

V zájmu udržení přesnosti alkoholtesteru Vám doporučujeme, abyste 1x za rok provedli jeho kalibraci. Kalibrace se nemusí provádět za každou cenu, ovšem bez ní se přesnost alkoholtesteru neustále snižuje.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do alkoholtesteru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Alkoholtester nevyžaduje kromě výměny baterií žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro alkoholtesteru.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterii vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Záruka

Na alkoholtester AL5500 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/07/2014