

Dampfinhalator mit Wick VapoPads®

W1300-DE



Abb. A



Abb. B



Abb. C

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Wick-Dampfinhalators. Ihr neuer Inhalator bietet alle Vorteile einer Dampfbehandlung – zu Hause, am Arbeitsplatz oder auf Reisen.

- Wohlthuende Mentholdämpfe
- Tragbar – überall einsetzbar
- Füllen Sie einfach heißes Leitungswasser ein, setzen Sie ein Duft-Pad ein und genießen Sie den wohlthuenden Dampf
- Spülmaschinenfest – wieder verwendbar
- Im Lieferumfang sind 2 Wick VapoPads® (Mentholduft-Pads) enthalten

Komponenten

1. Deckel 2. Mittelteil 3. Sockel

Gebrauchsanleitung

Spülen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch gründlich aus.


1. Nehmen Sie den Deckel des Geräts vom Sockel ab, indem Sie ihn hin und her drehen und abziehen.
2. Füllen Sie den Sockel mit heißem (nicht kochendem) Leitungswasser bis zur Linie, die den maximal zulässigen Wasserstand kennzeichnet. (Siehe Abb. A)

HINWEIS: Bei Befüllung über diese Linie hinaus, kann heißes Wasser auslaufen.

3. Öffnen Sie ein Wick VapoPad®-Duft-Pad-Päckchen und geben Sie den Inhalt ins Wasser. Bringen Sie den Deckel wieder an.

ACHTUNG: Das Gerät enthält heißes Wasser. Um zu vermeiden, dass nach dem Auffüllen des Geräts heißes Wasser ausläuft, achten Sie darauf, dass der Gehäusedeckel richtig einrastet und fest sitzt.

4. Atmen Sie die Wick-Dämpfe ein. (Siehe Abb. B)

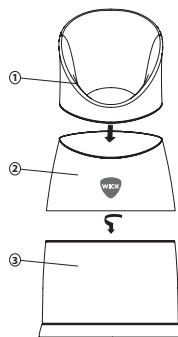

Pflege und Reinigung

Reinigen und trocknen Sie den Inhalator gründlich nach jedem Gebrauch.
Das Gerät darf in der obersten Schublade einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden. (Siehe Abb. C)

Mit Wick VapoPads® (Duft-Pads) verwenden

Ihr Inhalator ist zur Verwendung mit Wick VapoPads® Mentholduft oder Rosmarin&Lavendelduft bestimmt.



WARNUNG:

Pad kann zu Erstickungsgefahr führen. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren.

Flüssigkeit und Dampf entzündbar (H226).

Verursacht Hautreizungen (H315).

Kann allergische Hautreaktionen verursachen (H317).

Verursacht schwere Augenreizung (H319).

Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (H411).

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen (P102).

Von Hitze/ Funken/ offener Flamme/ heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen (P210).

Freisetzung in die Umwelt vermeiden (P273).

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife abspülen (P302+P352).

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen (P305+P351+P338).

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen (P333+P313).

Warnung: Geeignet für Kleinkinder ab 36 Monaten (WH7) / Geeignet für Babys ab 3 Monaten und/oder über 4,5 kg (WBR7). Nicht mehr als 16 Stunden pro 24-stündigem Zeitraum und/ oder nicht mehr als 2 Pads pro 24-stündigem Zeitraum verwenden.

WH7 enthält: Menthol, Eukalyptusöl, Zedernblattöl.

WBR7 enthält: Eukalyptusöl, Rosmarinöl, Lavendelöl.

Nur mit Wick VapoPads®
Rosmarin&Lavendelduft (WBR7)
oder Mentholduft (WH7) verwenden



Gewährleistung

Für den Wick-Dampfinhalator gilt eine Gewährleistung gegen Material- und Verarbeitungsfehler für zwei Jahre ab Kaufdatum. Ein defektes Teil wird kostenlos ausgetauscht, wenn es nicht unbefugt verändert wurde und das Gerät gemäß der schriftlichen Gebrauchsanleitung verwendet wurde.

www.wicklufbefeuchter.com

This product is manufactured under license from The Procter & Gamble Company.

Wick and other associated trademarks are owned by The Procter & Gamble Company.

 Kaz Europe Sàrl
Place Chauderon 18
CH-1003 Lausanne - Switzerland

www.hot-europe.com



Made and printed in China

P/N: 311M1300297R2
08JUN16

Helen of Troy

CREATIVE DEPARTMENT ARTWORK SPECIFICATIONS

Brand: Wick
Category: Inhaler
Model: **W1300-DE**
Artwork Part #: 31IM1300297R2
Die Line Part #: N/A
Agile Desc: OWNER'S MANUAL_KAZ
Artwork,W1300-DE
Subject: Owner's Manual
Region: EMEA
Flat Size: MM: **W139.7 x H203.2**
Folded Size: MM: **W139.7 x H203.2**
Scale: 1/1
Material: 50# gloss or matte text (inside pages)
Minimum 80# gloss or matte text (cover)
Page Count: 2
Revision: 2
Date: **08JUN16**
Release Date: **28OCT14**
Re-release Date: **26FEB16**

Colors:

Dielines (Do not print)

Spot Colors

Cyan
0%

Magenta
0%

Yellow
0%

Black
100%

PMS
XXXX

PMS
XXXX



Special Instructions:

**Quality Requirement of Artwork and Quality
Clarification Process of Artwork Printing:
Meet Eng-QS-06&02**

Kaz USA, Inc., a Helen of Troy Company
Creative Services
Marlborough, MA 01752, USA
+1 508 490 7000