

ACE KETOSCAN mini

Der ACE KETOSCAN mini ist ein speziell für Keto-Diäten entwickeltes Messgerät, mit dem man Ketone im Atem messen kann.

Mit dem KETOSCAN mini können Sie - nicht über Blut oder Urin, sondern über Ihren Atem - feststellen, ob Ihr Körper gerade in der Ketose ist. Die Messung erfolgt ohne Teststreifen oder schmerzhaftes Pieksen in den Finger, wodurch sich das Gerät als perfektes Hilfsmittel für Keto-Diäten erweist.

Bitte beachten Sie vor der Verwendung, dass Ketose im Körper in vielen Fällen erst nach einigen Tagen ohne oder mit eingeschränkter Aufnahme von Kohlehydraten beginnt

Dank der kostenlosen App für Android und iOS können Sie Ihre Ketose noch viel genauer überwachen und z.B. Fotos von gegessenen Lebensmitteln oder Kalendertage mit Ihrem Ketogen-Wert verknüpfen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Billig-Ketose-Testern reagiert der präzise Sensor des KETOSCAN mini viel empfindlicher - und nur auf Aceton. Das Ergebnis wird nicht durch andere Stoffe verfälscht.

Die ersten 300 Tests sind ohne Service möglich! Die erste Kalibrierung dieses ACE Messinstruments ist kostenfrei (deutsches Servicelabor). Kontaktieren Sie bitte Ihren Verkäufer, sobald Sie Ihr 300-Test-Limit erreicht haben.



ACE KETOSCAN mini: Ihr professioneller Begleiter bei ketogenen Diäten

Ketose ist ein Stoffwechselzustand, bei dem der Körper Energie aus körpereigenen Ketonen anstatt aus Glucose gewinnt. Dieser Zustand kann zum Beispiel bei Diabetes auftreten oder im Rahmen einer ketogenen Diät (bei kohlenhydratreduzierter Kost) gezielt herbeigeführt werden. In beiden Fällen ist die Überwachung Ihres Ketose-Levels mithilfe eines präzisen Messgeräts unabdingbar. In der Vergangenheit waren hierfür Urin-Teststreifen oder schmerzhaftes Bluttests notwendig. Mit dem KETOSCAN mini gibt es endlich eine genauso praktische wie präzise Lösung, mit der Sie Ihren Ketose-Zustand ganz einfach über den Atem messen können - vergleichbar mit der Messung des Alkoholgehalts in der Atemluft durch Verwendung eines Alkoholtesters.



Die Merkmale des ACE KETOSCAN mini im Überblick

Hochpräzise Sensortechnik

Der hochauflösende Aceton-Sensor des KETOSCAN mini ist einzigartig gegenüber anderen Keto-Atemanalysatoren, da er 10-mal empfindlicher auf Ethanol und 50-mal empfindlicher auf im Darm erzeugtes Wasserstoff reagiert als herkömmliche Sensoren. Unser Sensor wurde speziell dafür entwickelt, nur Aceton erkennen und andere Gase zu ignorieren, die die Ergebnisse verfälschen könnten.

Mit Selbstdiagnose-Modus

Der Sensor des KETOSCAN mini ist mit einer automatischen Selbstdiagnose-Funktion geschützt, die eine nachhaltige und langfristige Nutzung ermöglicht. Bitte beachten Sie, dass der Sensor nach 300 bis max. 320 Testzyklen ausgetauscht bzw. kalibriert werden muss, um potentiell gefährliche Verfälschungen der Ergebnisse zu vermeiden. Diese spezielle ACE-Version kann in Deutschland kalibriert werden.

Spezifikationen

- Offizielle ACE-Version für Deutschland Österreich und die Schweiz
- Hochauflösender Aceton-Sensor
- Ergebnisse in PPM
- Aufwärmzeit: 45 Sekunden
- Analysedauer: 5 Sekunden
- Mit wiederaufladbarem Lithium-Polymer-Akku
- Größe: 54 x 110 x 18,5 mm
- Gewicht: 74 g

In drei Schritten zum Ergebnis



App herunterladen

Laden Sie die kostenlose App "KETOSCAN" aus dem App Store (bei iOS-Geräten wie iPhones oder iPads) oder aus dem Google Play Store (bei Android-Smartphones und -Tablets) herunter.


Pairing über Bluetooth

Starten Sie zuerst die App und schalten Sie dann Ihren KETOSCAN mini ein. Die App wird automatisch nach dem Gerät suchen und sich über Bluetooth verbinden. Bei Fehlern vergewissern Sie sich bitte, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder Tablet eingeschaltet ist.

Test starten

Ziehen Sie das integrierte Mundstück heraus und pusten Sie drei Sekunden lang in das Gerät - ungefähr so, als würden Sie ohne Ton pfeifen. Danach können Sie das Messergebnis direkt auf dem Gerät sowie auf Ihrem Smartphone ablesen.

Die KETOSCAN App im Überblick

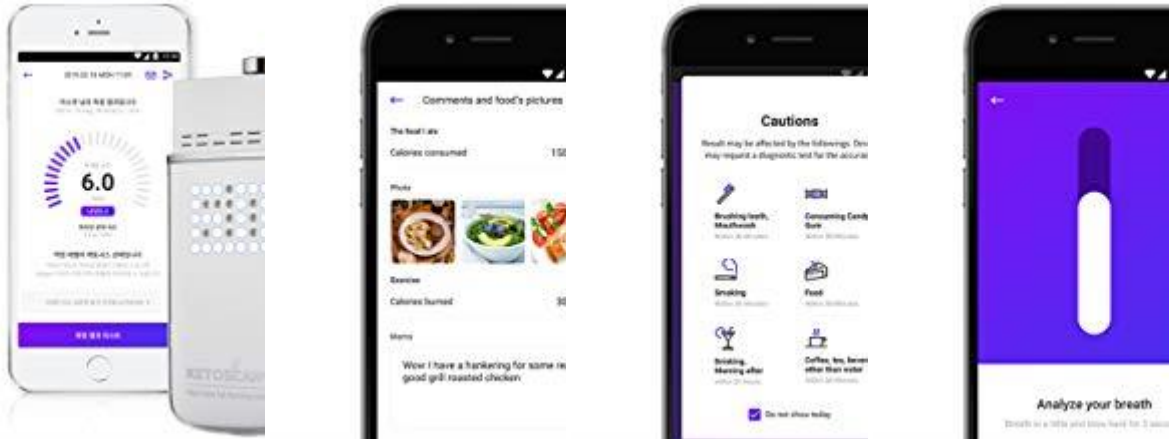

Überwachen Sie Ihren Aceton-Spiegel und Ihr Gewicht

Speichern und rufen Sie Ihre Tages-, Wochen- und Monatsergebnisse in der mobilen App ab. Perfekt für die Planung Ihres persönlichen Ernährungs- und Fitnessprogramms!

Die All-in-One-App für Ihre Keto-Diät

Es sind keine weiteren Diät-Apps erforderlich, um Ihre Fitnessziele zu erreichen. Pusten Sie einfach in das Gerät, erfahren Sie Ihren Aceton-Level, hinterlassen Sie Kommentare, verfolgen Sie die Verbrennung Ihrer Kalorien und speichern Sie Fotos von dem, was Sie wann gegessen haben.

Aufgepasst bei der Messung

Seien Sie vorsichtig bei Faktoren, die Ihre Messwerte beeinflussen können. Vermeiden Sie es, eine halbe Stunde vor der Durchführung des Tests Ihre Zähne zu putzen, zu rauchen, zu trinken oder zu essen.

Wie funktioniert der Test?

KETOSCAN mini benötigt eine stabile und ausreichende Atemprobe zur Analyse. Bitte befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um genaue und konsistente Testergebnisse zu erhalten.