

Produkt-Information „Community Maske“

Best.-Nr. 2274790

Funktionsbeschreibung



Das Produkt besteht aus 3lagigem Vliesfasergewebe, ist somit weich und atmungsaktiv. Über die elastischen Ohrbügel ist das Produkt leicht und komfortabel zu tragen. Das Produkt ist ein Einwegartikel und nicht steril.

Wichtige Informationen

- Achtung! Es handelt sich bei dieser Community-Maske nicht um ein Medizinprodukt und auch nicht um einen Gegenstand für persönliche Schutzausrüstung. Sie hat weder eine entsprechende Zertifizierung noch ist sie medizinisch geprüft.
- Vermeiden Sie es, die Innenseite der Maske zu berühren.
- Prüfen Sie den Zustand der Maske, bei sichtbarer Beschädigung ist die Maske zu entsorgen.
- Nur einmal verwenden.
- Nach Gebrauch entsorgen.
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Nicht während dem Schlafen verwenden.
- Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung.



Gebrauchsanweisung:

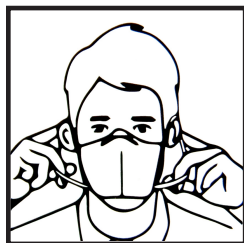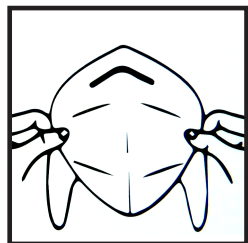

1. Halten Sie Ihre Hände trocken und nehmen Sie eine Maske aus der Verpackung heraus.
2. Falten Sie die Maske auf. Halten Sie sie so, dass der Nasenclip nach oben liegt. Legen Sie die Schlaufen um die Ohren.
3. Ziehen Sie die Maske über Nase und Kinn.
4. Biegen Sie das Metallteil an der Nase passend zur Gesichtsform. Achten Sie auf festen Sitz und Komfort.

Produkt	Community-Maske
Bauart	3-Lagen-Konstruktion mit Ohrschlaufen
Größe	175 mm x 95 mm
Farbe	Blau
Steril	Nein
Material	51% PP-Vliesstoff + 25% schmelzgeblasener Vliesstoff + 9% Nasenclip + 15% Ohrschlaufe
Aufbewahrung	Trockene Umgebung (<80% Luftfeuchte), gute Belüftungsbedingungen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt

Hersteller: Guangdong Mideacom Medical Equipment Technology Co. Ltd.

Adresse: 10th Floor, Plant No. 14-15 of Fulonghsan, Chenquiao, Chaozhou City, Guangdong Province, China

Einführer: Conrad Electronic SE

Adresse: Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Germany

Tel.: +49(0)9622/30-0

Email: tkb@conrad.de