

App zu den Trisa Electronics Bluetooth Geräten



Die App MedM Health gibt es für Android als auch für iOS. Je nach Betriebssystem finden Sie unsere App bei Google Play (Android) oder im App Store (iOS), oder Sie scannen den abgebildeten QR-Code. Dann können Sie MedM Health herunterladen und auf dem Smartphone oder Tablet installieren.

Sollte Ihr Gerät an der Vertrauenswürdigkeit der neuen App zweifeln, können Sie das Problem wie folgt lösen:


iPhone:

Gehen Sie zu Einstellungen/allgemein/Profile und geben Sie die App frei.
Vergessen Sie nicht die Bluetooth Funktion einzuschalten.


Android:

Gehen Sie zu Einstellungen/Apps/MedM Health und geben Sie die App frei.
Vergessen Sie nicht die Bluetooth Funktion einzuschalten.


Persönliche Angaben einstellen

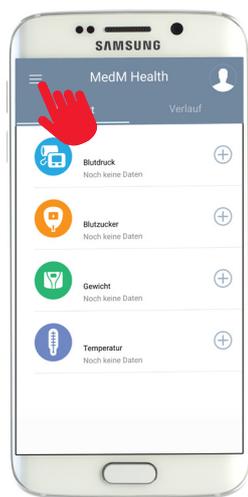

Öffnen Sie die neu installierte MedM Health App.
Tippen Sie oben links auf den Menü Knopf.

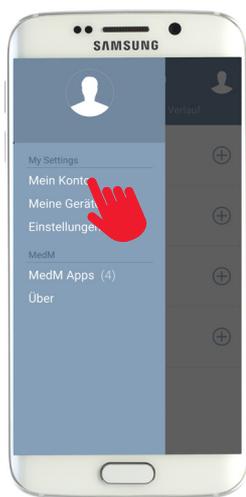


Tippen Sie auf „Mein Konto“.

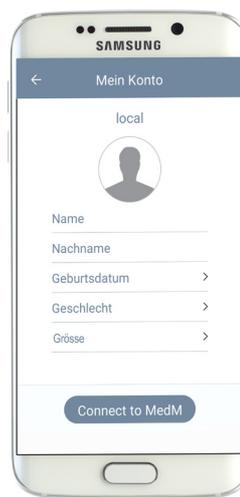


Dort können Sie Ihre persönlichen Daten wie z.B. Grösse und Gewicht angeben.
Dies ist wichtig, dass der BMI (Body-Mass-Index) richtig berechnet wird.

Installieren von Trisa Electronics Bluetooth Geräten

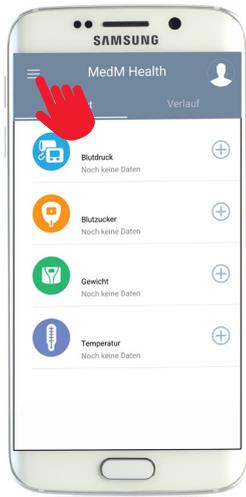

Öffnen Sie die neu installierte MedM Health App.
Tippen Sie oben links auf den Menü Knopf.

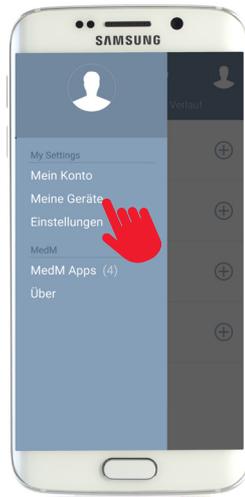

Tippen Sie auf „Meine Geräte“.



Tippen Sie auf „Hinzufügen“.
Die App sucht nun nach neuen Geräten.
Nun müssen Sie auf dem Gerät, das Sie hinzufügen wollen, die Verbindungstaste ca. 5 Sekunden lang drücken.

Wo befinden sich die Verbindungstasten auf den Geräten?

Schrittzähler
„3D Activity Tracker“



Seitlich am Display

Blutdruck Messgerät
„Simple Wrist 4.0“



„START | STOP“ Taste

Blutdruck Messgerät
„Cardio Pro 4.0“



„Testperson 2“ Taste

Körperwaage
„Easy Scale 4.0“



Auf der Rückseite

Körperwaage
„Body Analyze 4.0“



Auf der Rückseite

Wichtig

Die Verbindungstaste muss ca. 5 Sekunden lang gedrückt werden



Solange sich das Gerät mit der App verbindet erscheint dieses Symbol auf dem Display


Installieren von Trisa Electronics Bluetooth Geräten



Auf dem Display erscheint nun das Gerät. Tippen Sie nun auf das Gerät.



Wählen Sie, ob das Gerät nur für Sie verfügbar sein soll, oder auch für alle anderen Benutzer. Danach tippen Sie auf „Zu Meinen Geräten hinzufügen“

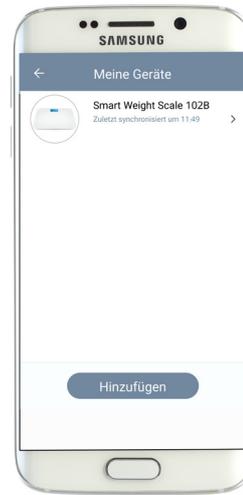

Das Gerät ist nun unter „Meine Geräte“ verfügbar. Dort können Sie z.B. auch den Namen des Gerätes ändern, wenn Sie das möchten. Wenn Sie weitere Geräte hinzufügen wollen, tippen Sie einfach wieder auf die „Hinzufügen“ Schaltfläche.

