

Informations sur le produit « Community Mask »

N° de commande 2274790

Description fonctionnelle


Le produit est fait d'un tissu polaire à trois couches, ce qui le rend doux et respirant. Le produit est léger et confortable à porter grâce aux boucles d'oreilles élastiques. Le produit est un article jetable et non stérile.

Informations importantes sur le produit

- Attention ! Ce masque communautaire n'est pas un dispositif médical et également pas autour d'un objet pour l'équipement de protection individuelle. Il n'a pas la certification appropriée et n'est pas non plus testé médicalement.
- Évitez de toucher l'intérieur du masque.
- Vérifiez l'état du masque ; s'il y a des dommages visibles, jetez le masque.
- A n'utiliser qu'une seule fois.
- Éliminer après usage.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Ne pas utiliser pendant le sommeil.
- Lisez le mode d'emploi avant l'utilisation.



Mode d'emploi :

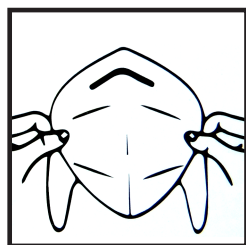

1. Gardez vos mains au sec et retirez un masque de son emballage.
2. Déplier le masque. Tenez-le de manière à ce que le pince-nez soit en haut. Mettez les boucles autour de vos oreilles.
3. Mettez le masque sur votre nez et votre menton.
4. Pliez la partie métallique du nez pour l'adapter à la forme de votre visage. Assurez-vous que le masque est bien ajusté et confortable.

Produit	Masque communautaire
Tapez	Construction à 3 couches avec boucles d'oreilles
Taille	175 mm x 95 mm
Couleur	Bleue
Stérile	Non
Matériel	51% PP non tissé + 25% non tissé meltblown + 9% pince-nez + 15% boucle d'oreille
Stockage	Environnement sec (<80% d'humidité), bonnes conditions de ventilation, à l'abri de la lumière directe du soleil

Fabricant : Guangdong Mideacom Medical Equipment Technology Co. Ltd.

Adresse : 10th Floor, Plant No. 14-15 of Fulonghsan, Chenquiao, Chaozhou City, Guangdong Province, China

Importateur : Conrad Electronic SE

Adresse : Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Allemagne

Téléphone : +49(0)9622/30-0

Courriel : tkb@conrad.de