


Naprava za elektroterapijo 3 v 1 TT 200

Naprava in nadzor

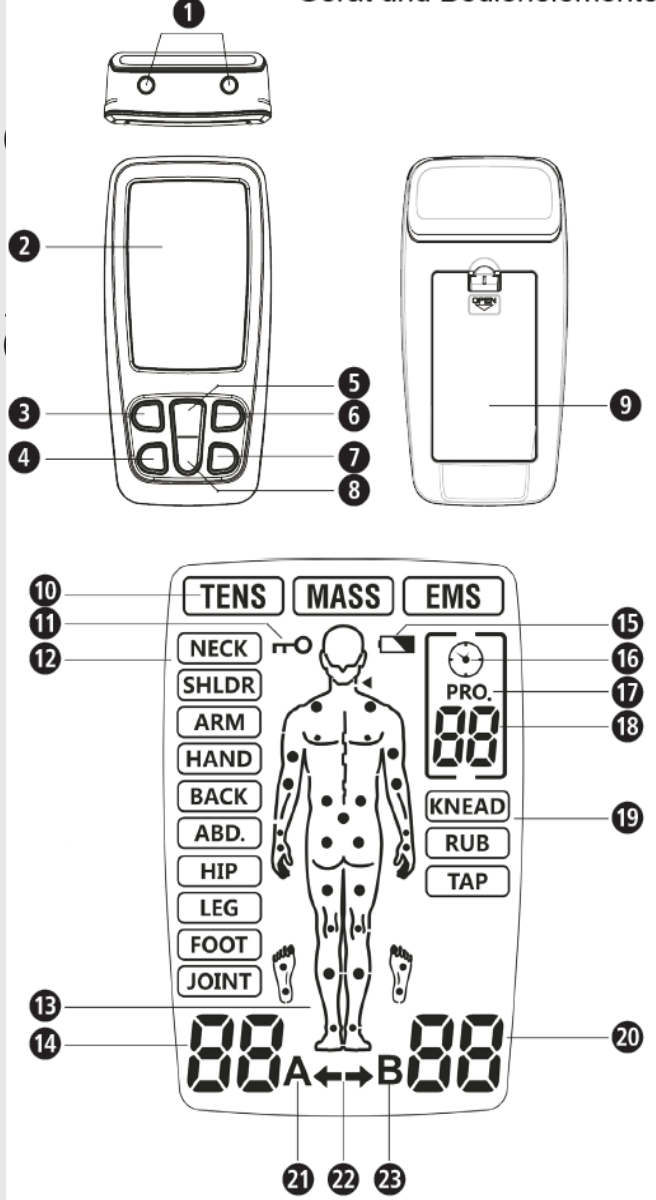

POMEMBNO!
Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe ali poškodbe naprave.

OPOZORILO
Ta opozorila je treba upoštevati, da bi preprečili morebitne poškodbe uporabnika.

POZOR
Ta navodila je treba upoštevati, da preprečite morebitne poškodbe naprave.

OPOMBA
V teh opombah so na voljo koristne dodatne informacije o namestitvi ali delovanju.

Razvrstitev naprave: Tip BF
Številka serije

IP22 Specifikacija stopnje zaščite pred tujki in vodo

Pooblaščen predstavnik EU

Proizvajalec
Datum izdelave

SL Varnostna navodila

Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo, zlasti varnostna navodila, in jih shranite za poznejšo uporabo. Če aparat posredujete tretji osebi, mu obvezno priložite ta navodila za uporabo.

Predvidena uporaba
Naprava za elektroterapijo 3 v 1 medisana TT 200 je namenjena za naslednja področja uporabe:

- Način TENS: Začasno lajšanje bolečin v mišicah vratu, ramenih, hrbtu, sklepih, kolkih, rokah, trebuhu, stopalih, zgornjih (rokah) in spodnjih (nogah) okončinah zaradi napora pri vadbi ali običajnem gospodinskem delu.
- Način EMS: Program stimulacije EMS stimulira zdrave mišice za izboljšanje in spodbujanje mišične zmogljivosti.
- Način masaže: Masažni program z vibracijami s p r o š č a napete mišice.

Kontraindikacije (kontraindikacije)

- Naprave ne uporabljajte, če imate v telesu srčni spodbujevalnik, defibrilator ali druge elektronske ali kovinske vsadke. Ti lahko povzročijo električni udar, opekline, električne motnje ali smrt.
- Naprave ne uporabljajte na rakavih ali drugih spremembah na območju zdravljenja.
- Ne uporabljajte na delih telesa z oteklina, opeklinami, vnetji, kožnimi izpuščaji (npr. flebitis, tromboflebitis, krčne žile itd.), ranami ali občutljivimi deli.
- Elektrode ne smejo biti nameščene tako, da bi lahko tok tekel skozi karotidni sinus (sprednji del vratu) ali transcerebralno (skozi glavo).
- Te naprave ne smete uporabljati na preveč obremenjenih delih kože.
- Naprave ne smete uporabljati pri obstoječi herniji.
- Ne zdravite delov telesa, ki so po operaciji zaznamovani z brazgotinami - pred uporabo naprave počakajte vsaj 10 mesecev po operaciji.
- Naprave ne uporabljajte v primeru hudih motenj krvnega obtoka v spodnjih okončinah.

Terapije z napravo **medisana TT 200** ne nadomeščajo medicinskih diagnoz ali zdravljenja. Prosimo, vprašajte pred uporabo naprave se posvetujte z zdravnikom zaradi kakršne koli bolečine ali bolezn.

- Če se bolečina ne umiri ali ne postane bistveno blažja ali če traja več kot 5 dni, prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na zdravnika.
- Naprave ne uporabljajte na sprednjem in stranskem delu vratu, saj lahko to povzroči hude mišične krče, zaporo dihalnih poti, težave z dihanjem ali škodljive učinke na srčni ritem ali krvni tlak.
- Naprave ne uporabljajte na prsih, saj lahko uporaba toka na prsih povzroči srčno aritmijo, ki je lahko usodna.
- Naprave ne uporabljajte nad rakavih spremembami ali v njihovi bližini.
- Elektronske nadzorne naprave (kot so monitorji EKG in alarmi EKG) morda ne bodo delovale pravilno, če se uporablja električna stimulacija.
- Naprave ne uporabljajte med kopanjem ali prhanjem.
- Naprave ne uporabljajte, ko spite.
- Naprave ne smete uporabljati med upravljanjem stroja, vožnjo avtomobila ali med katero koli dejavnostjo, pri kateri električna stimulacija predstavlja nevarnost poškodb.
- Stimulacija se lahko izvaja le na normalnih, nepoškodovanih, čistih in zdravih delih kože.
- Dolgoročni učinki električne stimulacije niso znani. Elektrostimulacija ne more nadomestiti zdravl.
- Naprave ne smete uporabljati, če je uporabnik povezan z visokofrekvenčno kirurško opremo. To lahko povzroči opekline na koži pod elektrodami ali povzroči težave z napravo.
- Naprave ne uporabljajte v bližini kratkovalovnih ali mikrovalovnih terapevtskih naprav, saj to lahko vpliva na izhodno moč naprave.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v bližini srca. Elektrod nikoli ne pritrujete na prsni koš je treba uporabiti košarico. Obstaja nevarnost ventrikularne fibrilacije ali srčnega zastoja.
- Naprave tudi ne smete uporabljati v bližini oči, glave ali obraza.
- Ne uporabljajte v bližini spolovil!
- Ne nanašajte na predele kože z oslajbljenim občutkom.
- Elektrodi se med uporabo ne smeta dotikati druga druge. To lahko povzroči nepravilno delovanje in kožo opekline.
- Napravo hranite zunaj doseg a otrok.
- Zdravljenje mora biti prijetno. Če čutite bolečino ali se vam zdi zdravljenje neprijetno, ne povečujte intenzivnosti, temveč prekinite zdravljenje in se posvetujte z zdravnikom.
- Način TENS ni učinkovit pri bolečinah centralnega izvora, vključno z glavoboli. Ne nadomešča medicinske terapije ali predpisanih zdravil proti bolečinam.
- TENS je simptomatsko zdravljenje in zavira občutek bolečine, ki bi sicer služil kot zaščitni mehanizem.
- Učinkovitost je v veliki meri odvisna od izbire zdravnika, ki je usposobljen za zdravljenje bolnikov z bolečino.
- Učinki stimulacije možganov niso znani, zato se uporaba ne sme izvajati na glavi. Elektrod nikoli ne smete namestiti nasproti druga drugi na straneh glave.
- Varnost električne stimulacije med nosečnostjo ni bila preizkušena.
- Zaradi električne stimulacije z električno prevodnim medijem lahko pride do draženja kože ali preobčutljivostnih reakcij.
- Če imate bolezn srca ali epilepsijo, se pred uporabo naprave vedno posvetujte z zdravnikom.
- Če ste nagnjeni k notranjim krvavitvam, npr. po zlomu ali menstruaciji, pripomoček uporabljajte previdno ali le po posvetu z zdravnikom.
- Če ste pred kratkim opravili kirurški poseg, se pred uporabo naprave posvetujte z zdravnikom, saj lahko stimulacija ovira proces celjenja.
- To napravo lahko uporabljate samo en bolnik.
- Naprave ne smejo uporabljati osebe z demenco ali drugimi duševnimi motnjami.
- Napravo uporabljajte samo tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba se šteje za nepravilno in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. **medisana** ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe. Naprava je namenjena za zasebno uporabo.
- V redkih primerih lahko dolgotrajna uporaba povzroči draženje kože na območju elektrod.
- Naprave ne uporabljajte skupaj z drugimi napravami, ki pošiljajo električne impulze v telo. prenesene.
- Za pritiskanje na gumb e na napravi ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov, kot je biro. služijo.
- Pred vsako uporabo preverite priključke elektrod.
- Uporabljajte samo elektrode, ki jih proizvajalec priporoča za to napravo.

Neželeni učinki

- Na območju uporabe elektrod lahko pride do draženja kože ali opeklin.
- V zelo redkih primerih prvi uporabniki naprave EMS poročajo o zaspanosti ali omedlevicah. Priporočamo, da napravo uporabljate v sedečem položaju, dokler se ne seznanite z njeno uporabo.
- Če se počutite neprijetno, zmanjšajte intenzivnost stimulacije na udobno raven. Obrnite se na nas Če se težave nadaljujejo, se posvetujte z zdravnikom.

Obseg dobave

Najprej preverite, ali je naprava popolna in nepoškodovana. V primeru dvoma Naprave ne uporabljajte in se obrnite na prodajalca ali servisni center.

Obseg dobave vključuje:

- 1 naprava za elektroterapijo **medisana 3 v 1 TT 200**
- 4 elektrode 50x50 mm - 2 priključna kabla - 3 baterije AAA 1,5 V - 1 priročnik z navodili

Če med razpakiranjem opazite kakršne koli poškodbe pri prevozu, se takoj obrnite na prodajalca. v povezavi s tem.

OPOZORILO
Poskrbite, da embalažna folija ne pride v roke otrokom! Obstaja nevarnost zadušitve!

Naprava in nadzor

1-Izhodna povezava 2-Zaslonska plošča 3-Gumb za vklop/izklop/M 4-Gumb T 5-Gumb + 6-Gumb B 7-Gumb CH 8-gumb 9- Predal za baterije 10-Način terapije 11-Naprava zaklenjena 12-Območje telesa 13-Priporočene točke zdravljenja 14-Kanal intenzivnosti A 15-Prazna baterija 16-Simbol časovnika 17-Simbol programa 18-Številka programa / čas terapije 19-Način masaže 20-Kanal intenzivnosti B 21-Simbol za kanal A 22-Indikator kanala 23-Simbol za kanal B

Vstavljanje / menjava baterij

Odprite pokrov predala za baterije na zadnji strani in vstavite 3 priložene baterije (tip AAA, 1,5 V) v skladu s simboli (+ / -). Predalček za baterije ponovno zaprite. Pri kasnejši zamenjavi baterij vedno uporabljajte samo 1,5V baterije tipa Micro (AAA/LR6).

VARNOSTNA NAVODILA ZA BATERIJE

- Ne razstavljajte baterij!
- Šibke baterije takoj odstranite iz predala za baterije, saj lahko iztečejo in poškodujejo napravo!
- Povečana nevarnost iztekanja, izogibajte se stiku s kožo, očmi in sluznicami!
- V primeru stika s akumulatorsko kislino prizadeta mesta takoj sperite z veliko čiste vode in takoj poiščite zdravniško pomoč!
- Če ste zaužili baterijo, se takoj posvetujte z zdravnikom!
- Vedno zamenjajte vse baterije hkrati!
- Uporabljajte samo baterije iste vrste, ne uporabljajte različnih vrst ali rabljenih in novih baterij skupaj!
- Pravilno vstavite baterije in upoštevajte polarnost!
- Baterije hranite stran od otrok!
- Ne polnite baterij! Obstaja nevarnost eksplozije!
- Ne izvajajte kratkega stika! Obstaja nevarnost eksplozije!
- Ne mečite v ogenj! Obstaja nevarnost eksplozije!
- Izrabljenih baterij in akumulatorskih baterij ne odlagajte med gospodinske odpadke, temveč med nevarne odpadke ali v center za recikliranje.
- Zbirna postaja za baterije v specializiranih trgovinah!

Kabelska povezava

Pred priključitvijo kablov se prepričajte, da je naprava izklopljena. Najprej priključite elektrodi na oba priključna kabla, nato pa še kabla na napravo. Na zgornji strani naprave sta dva izhodna priključka 1 za priključitev elektrodnih kablov. Naprava ima dva priključka za dva kanala (A in B). Glede na svoje zahteve se lahko odločite, ali želite uporabljati samo en kanal z enim parom elektrod ali pa oba kanala povezati z dvema paroma elektrod. S spletno stranjo z dvema paroma elektrod lahko hkrati stimulirate dva različna dela telesa.

OPOZORILO
Elektrodnih kablov NIKOLI ne vklaplajte v vtičnico ali drug vir napajanja!

Namestitev elektrod

Nosilno folijo za večkratno uporabo lahko odstranite neposredno pred uporabo - shranite jo za poznejšo uporabo. Nato namestite elektrode glede na področje bolečine (upoštevajte navodila zdravnika).

OPOZORILO



- Naprava mora biti med nameščanjem elektrod izklopljena!
- Pred namestitvijo elektrod odstranite vse ostanke kreme ali mazila s kože. Koža mora biti suha in brez maščobe.
- Elektrod ne prilepite na poškodovana ali vneta mesta na koži (rane, madeži, izpuščaji, rdečica itd.).
- Vedno najprej namestite elektrode v skladu z zdravnikovimi navodili in šele nato vklopite napravo.
- Poskrbite, da elektrode med zdravljenjem ne bodo padle. To lahko povzroči nenameren električni udar!
- Če se elektroda med zdravljenjem odlepi od kože, napravo takoj izklopite.

V nadaljevanju so navedeni predlogi za namestitev elektrod glede na način zdravljenja. Upoštevajte pa, da se vsak bolnik na terapije s stimulacijskim tokom odziva drugače - zato se lahko namestitev elektrod in izbira programa za vaše potrebe razlikujeta od tukaj predstavljenih terapij. Optimalne parametre za vas (položaj elektrod, program in jakost električnega toka) si morate zabeležiti za naslednje terapije.


Priporočene točke zdravljenja 0 so prikazane na sliki za vsak program. Naslednje

Na slikah so prikazani primeri pritrditve elektrod na te točke zdravljenja.

Primeri postavitve elektrod v načinu terapije TENS:

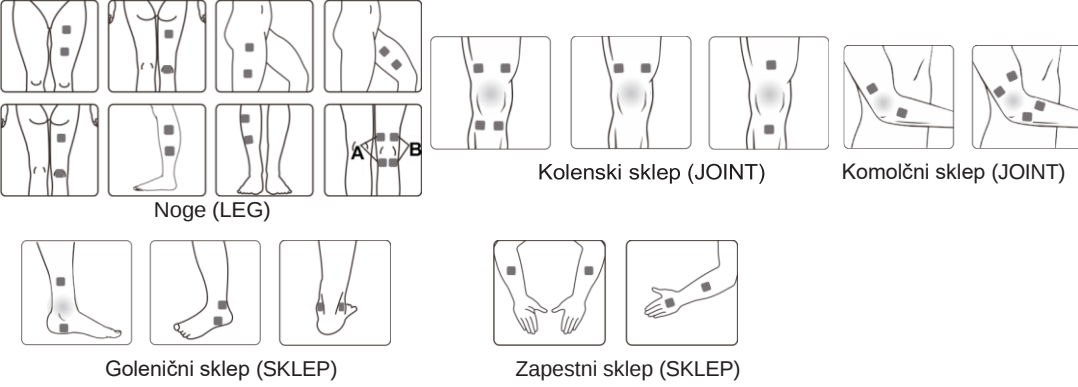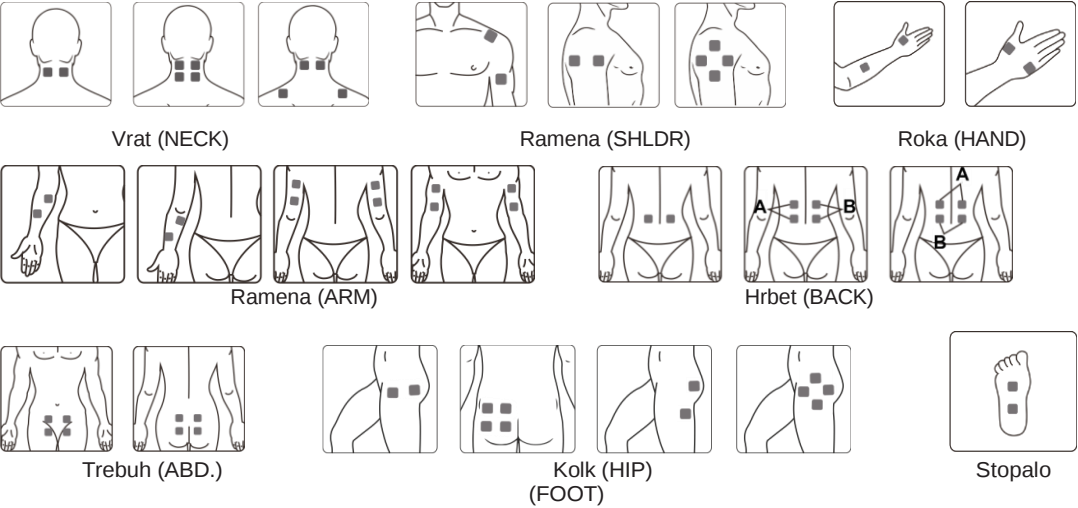

Primeri postavitve elektrod v načinu terapije EMS:

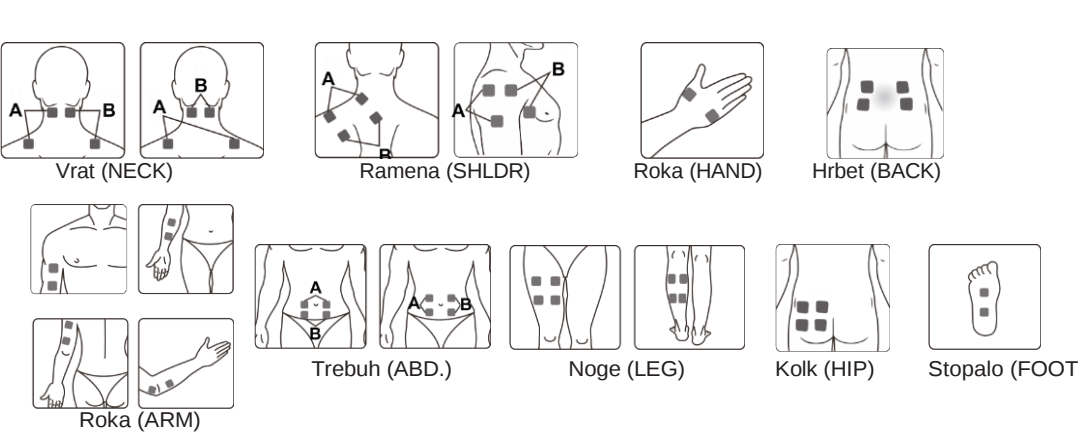


Vklopite


Za vklop na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop/M 3. Zasl on se prižge in naprava je v načinu pripravljenosti. Z gumbom On/Off/M 3 izberite način terapije:



Nato z gumbom B 2 izberite področje telesa, ki ga želite stimulirati:

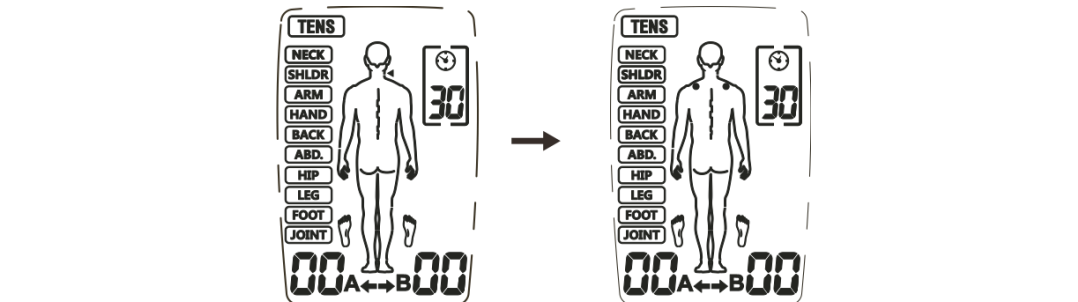


Z gumbom CH 7 izberite kanal (kanal A, kanal B ali oba kanala):

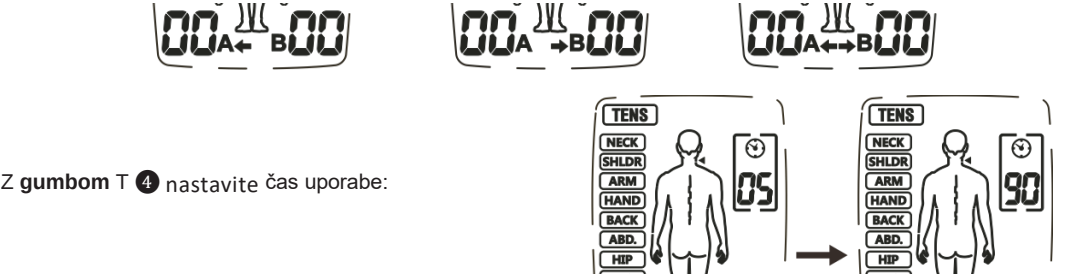


Z gumbom T 4 nastavite čas uporabe:


Zdaj pritisnite gumb + 5, da povečate intenzivnost izbranega kanala. Na zaslonu se prikaže ustrezna stopnja intenzivnosti. Vsakič, ko pritisnete gumb + 5, lahko intenzivnost še povečate do najvišje ravni 40:

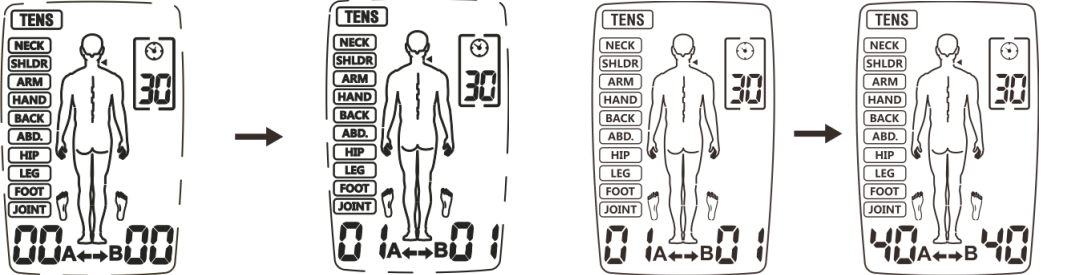


Pritisnite gumb 6, da ustrezno zmanjšate intenzivnost. Če intenzivnost zmanjšate na 0, se naprava preklopi v način pripravljenosti.

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Med uporabo lahko napravo zaklenete tako, da pritisnete in pridržite gumb B 9. Na zaslonu se prikaže simbol 0. Ko je naprava zaklenjena, intenzivnosti ne morete pomotoma prilagoditi. Če želite ponovno sprostiti zaklepanje, pritisnite in držite gumb B 9, dokler simbol 0 ne izgine.

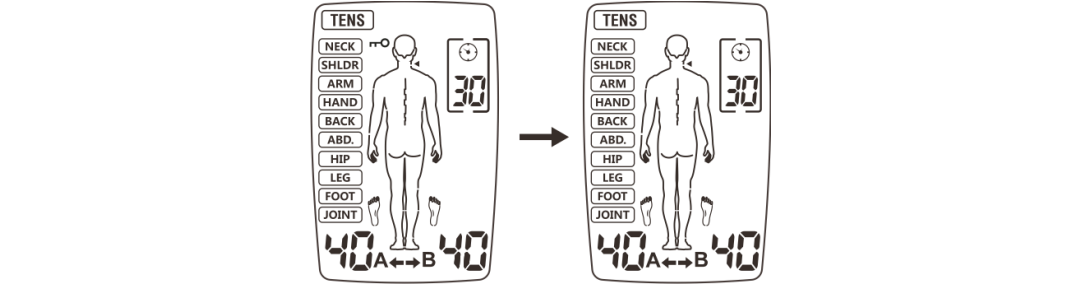



SL Navodila za uporabo
Naprava za elektroterapijo 3 v 1 TT 200

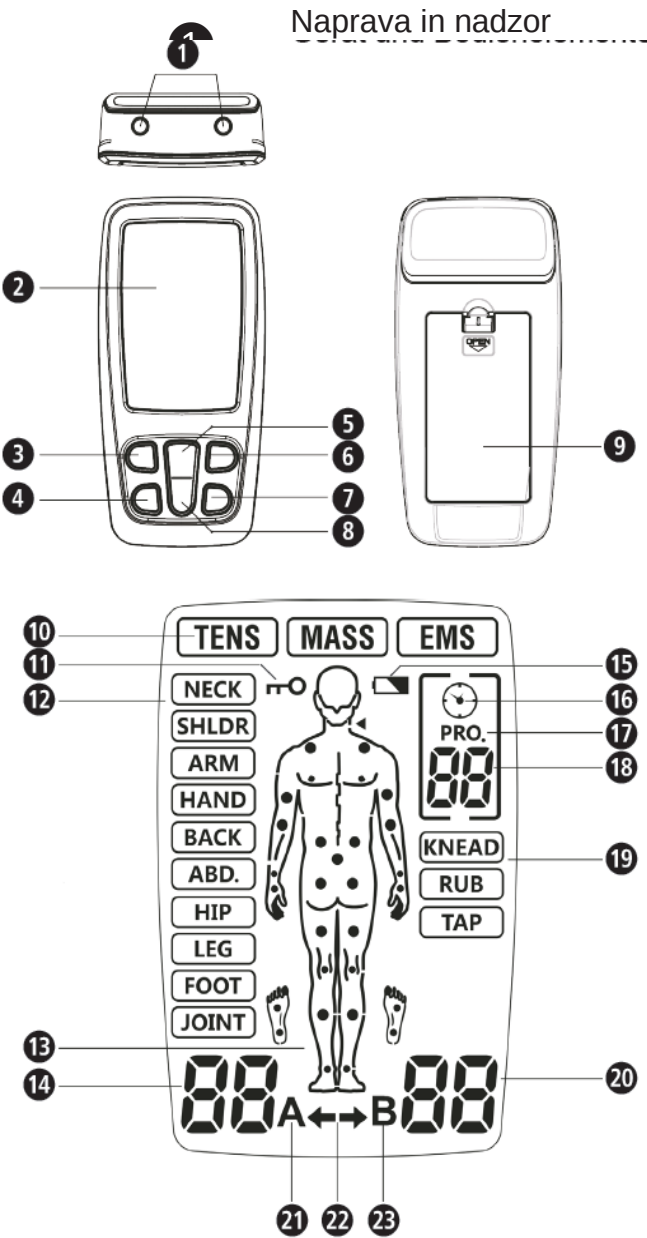

Razlaga simbolov

POMEMBNO!

Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe ali poškodbe naprave.

OPOZORILO

Ta opozorila je treba upoštevati, da bi preprečili morebitne poškodbe uporabnika.

POZOR

Ta navodila je treba upoštevati, da preprečite morebitne poškodbe naprave.

OPOMBA

V teh opombah so na voljo koristne dodatne informacije o namestitvi ali delovanju.

Razvrstitev naprave: Tip


LOT BF Številka serije

IP22 Specifikacija stopnje zaščite pred tujki in vodo
EC REP Pooblaščen predstavnik EU

Proizvajalec

Datum izdelave

Pritisnite gumb Vklop/izklop/M 3, da zapustite aplikacijo. Ponovno pritisnite gumb Vklop/izklop/M 3 izklopi napravo.

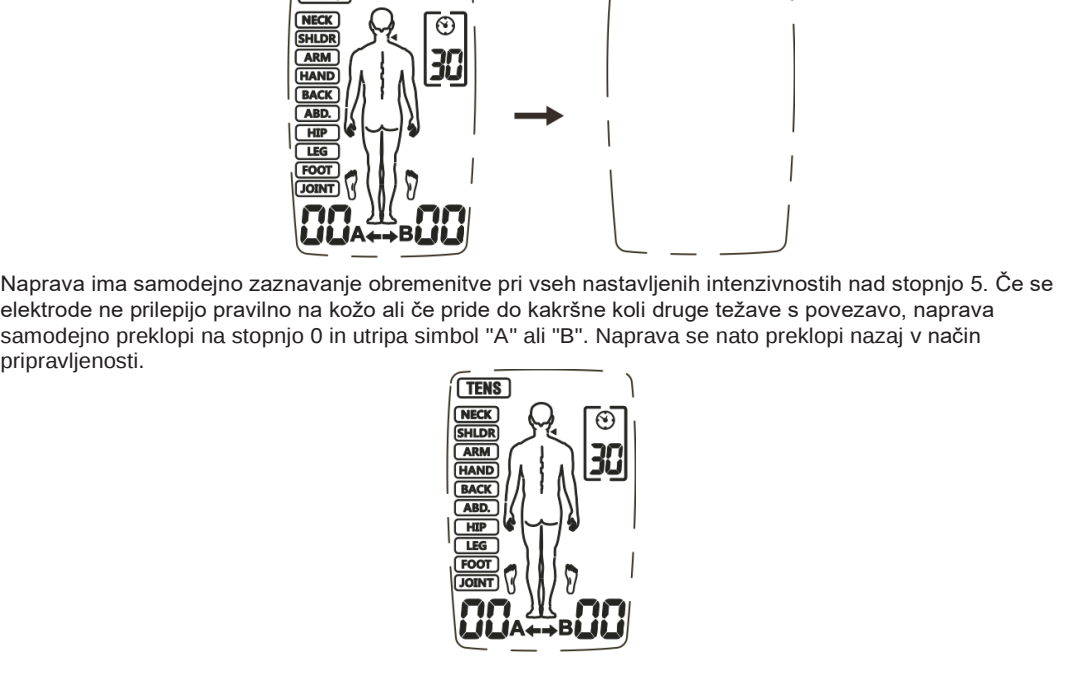

Če je napetost baterije prenizka, utripa simbol "Nizka napetost baterije" 0. Ustavite aplikacijo in zamenjajte baterije.

Uporaba elektrod

- Priložene elektrode se lahko uporabljajo samo z napravo za elektroterapijo medisana 3 v 1 TT 200. Prepričajte se, da je naprava izklopljena, preden namestite in odstranite elektrode.
- Če želite elektrode med uporabo ponovno namestiti, napravo najprej izklopite.
- Uporaba elektrod lahko povzroči draženje kože. Če opazite takšno draženje (npr. rdeča koža, mehurji ali srbenje), prenehajte z uporabo. Elektrod ne uporabljajte redno na istih delih kože.
- Nikoli ne uporabljajte elektrod skupaj z drugimi osebami.
- Elektrode morajo biti v popolnem stiku s kožo, da se izognete morebitnim vročim točkam, ki lahko povzročijo opekline.
- Istih elektrod ne uporabljajte več kot 10-krat, ker se povezava z elektrodami površina kože se z vsako uporabo poslabša.
- Lepilna sila elektrod je odvisna od lastnosti kože, pogojev shranjevanja in števila nanosov. Če se elektrode ne prilepijo več v celoti na površino kože, jih zamenjajte z novimi. Po uporabi elektrodne blazinice ponovno nalepite na zaščitno folijo in elektrode shranite v vrečko za shranjevanje, da se ne izsušijo. S tem se bo lepilna sila ohranila dlje časa.
- Očistite in posušite dele kože, na katere boste namestili elektrode.
- Nikoli ne odstranite elektrod s kože, ko naprava še deluje.
- Uporabljajte samo originalne elektrode, ki jih priporoča proizvajalec. Druge elektrode lahko povzročijo poškodbe.
- Vsaka oseba se na električno stimulacijo živcev odziva drugače. Pravilna namestitev elektrod se lahko med posamezniki razlikuje. Obrnite se na svojega zdravnika, da ugotovite, katera namestitev je za vas najprimernejša.
- Ne uporabljajte elektrod, ki so manjše od priloženih. Gostota toka je lahko prevelika in povzroči poškodbe.
- Ne spreminjajte priloženih elektrodnih blazinic, npr. z rezanjem.
- Prepričajte se, da je področje, kjer se pojavlja bolečina, v celoti prekrito z elektrodnimi blazinicami. Pri bolečih mišičnih skupinah morajo elektrode doseči vse prizadete mišice.

OPOMBE o uporabi TENS

OPOMBE o aplikaciji EMS

Vzdrževanje in čiščenje
Da bi zagotovili nemoteno in dolgoročno zanesljivo delovanje naprave, je treba upoštevati naslednje točke:

- Odstranite elektrode iz naprave in jo očistite z mehko, rahlo vlažno krpo. V primeru močne umazanije lahko uporabite tudi blago čistilno sredstvo.
- Napravo zaščitite pred vlago. Naprave ne držite pod tekočo vodo in je ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Naprave ne postavljajte na vroče površine in je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Površino elektrodnih blazinic očistite z rahlo vlažno krpo. Prepričajte se, da da je bila naprava predhodno izklopljena!
- Zaradi higiene mora vsak uporabnik uporabljati svoje elektrodne blazinice.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte agresivnih snovi ali kemičnih čistil.
- Poskrbite, da v aparat ne prodre tekočina. Napravo ponovno uporabite šele, ko je je popolnoma suha.
- Naprave nikoli ne čistite med delovanjem. Pred čiščenjem se prepričajte, da je aparat izklopljen in da so bile odstranjene baterije!

Vzdrževanje

- Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nepooblaščenih popravil. Ima Če ima vaša naprava tehnične težave, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.
- Popravil ne poskušajte opravljati sami.
- Odpiranje naprave bo razveljavilo garancijo.
- Vaša naprava je bila pred prodajo testirana in ne potrebuje umerjanja ali rednega vzdrževanja. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na službo za stranke.

Problem	Možni razlogi	Protiukrepi
Po zamenjavi baterije ni prikaza	Baterije niso pravilno vstavljene ali Tujek v predelu za baterije. Tip baterije je morda napačen.	1. Preverite in očistite predal za baterije. 2. Vstavite nove baterije ustrezne vrste. Prepričajte se, da je polariteta pravilna!
Ni stimulacije ali je prešibka	- Elektrode niso pravilno nameščene na Postavljena koža - Povezava z napravo ni vzpostavljena optimalno - Rabljene baterije - Presuha koža	1. Preverite, ali so elektrode pravilno pritrjene na kožo in ali je kabelska povezava z napravo optimalna. 2. Zamenjajte baterije. 3. Kožo in elektrode obrišite z navlaženo bombažno krpo.
koža med uporabo mravljinči ali peče.	- Vloga je predolga. - Elektrode niso pravilno nameščene na kožo ali stik ni optimalen. - Koža je preobčutljiva	1. Napravo uporabljajte enkrat na dan in skrajšajte čas uporabe. 2. Preverite, ali so elektrode pravilno pritrjene na kožo. 3. Kožo in elektrode obrišite z navlaženo bombažno krpo. 4. Če imate preobčutljivo kožo, se posvetujte z Vaš zdravnik.
Naprava se med uporabo ustavi	- Elektrode niso pravilno nameščene na kožo ali stik ni optimalen. - Rabljene baterije	1. Preverite, ali so elektrode pravilno pritrjene na kožo. 2. Zamenjajte baterije.

Shranjevanje
Izklopite napravo in odstranite kable. Elektrode položite na nosilno folijo in jih skupaj z napravo in kablji zapakirajte v originalno embalažo. Upoštevajte pogoje skladiščenja iz tehničnih podatkov! Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije iz prostora za baterije.

Način	Del telesa	Frekvenca Hz	Širina impulza μs	Trajanje terapije Min.	Oblika krivulje
TENS	Vratna stran	80-120	120-100	Standard: 30 Nastavljivo: 5-90	Modulacija
	Ramena	80-100	100	Standard: 30 Nastavljivo: 5-90	Modulacija
	Roka	2-60	260-160	Standard: 30 Nastavljivo: 5-90	Modulacija
	Roka	100	100	Standard: 30 Nastavljivo: 5-90	Dosledno
	Nazaj	60/50/45/10 /50/35	200	Standard: 30 Nastavljivo: 5-90	Modulacija
	Trebuh	120	55	Standard: 30 Nastavljivo: 5-90	Dosledno
	Hip	100	150	Standard: 30 Nastavljivo: 5-90	Kratek Skupine Impulse
	Noge	40/6/50	250	Standard: 30 Nastavljivo: 5-90	Modulacija
	Stopala	80-120	100-120	Standard: 30 Nastavljivo: 5-90	Modulacija
	Sklepi	120	100-120	Standard: 30 Nastavljivo: 5-90	Modulacija
EMS	Vratna stran	30	200	Standard: 30 Nastavljivo: 5-90	Sinhronizacija
	Ramena	45	200	Standard: 30 Nastavljivo: 5-90	Sinhronizacija
	Roka	50	150	Standard: 30 Nastavljivo: 5-90	Sinhronizacija
	Roka	4	200	Standard: 30 Nastavljivo: 5-90	Sinhronizacija
	Nazaj	60	200	Standard: 30 Nastavljivo: 5-90	Sinhronizacija
	Trebuh	20	200	Standard: 30 Nastavljivo: 5-90	Sinhronizacija
	Hip	30	150	Standard: 30 Nastavljivo: 5-90	Sinhronizacija
MASAŽA	Noge	80	200	Standard: 30 Nastavljivo: 5-90	Sinhronizacija
	Stopala	20	200	Standard: 30 Nastavljivo: 5-90	Sinhronizacija
	Gnetenje	28-44	120~250	30	Modulacija
	Rešetke	25-79	120~250	30	Modulacija
	Trkanje	49-97	100~240	30	Modulacija

Odstranjevanje odpadkov
Te naprave ne smete odlagati med gospodinske odpadke. Vsi potrošniki morajo vse električne in elektronske naprave, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi ali ne, odnesti na zbirno mesto v svojem mestu ali k prodajalcu na drobno, da se jih lahko odstrani na okolju prijazen način. Preden napravo zavrzete, odstranite baterije. Uporabljeno napravo zavrzite baterije ne odlagajte med gospodinske odpadke, temveč med nevarne odpadke ali v zbirni center za baterije. v specializiranih trgovinah. Glede odstranjevanja se obrnite na lokalne oblasti ali prodajalca.

Dodatki
Komplet kablov - številka izdelka 88359
8 samolepilnih elektrod - številka izdelka 88349

Tehnični podatki Ime in model: St. modela: Napajanje: Kanali: Napajanje: Napajalni tok: 1: Valovna oblika: Izhodni tok: Intenzivnost: Natančnost izhoda: Načini uporabe: Število programov: Širina impulza: Frekvenca: Čas uporabe: Samodejni izklop: Delovni pogoji:

Približne mere Velikost elektrodnih blazinic pribl. Približna teža: Številka izdelka: Številka EAN:

naprava za elektroterapijo 3 v 1 medisana TT 200 R-C4B
---3 x 1,5 V, mikro baterije (AAA) 2
Dvofazni kvadratni valovni impulz Največ 120 mA (z obremenitvijo 500 Ohmov), nastavljiv v 40 korakih ±20 % za vse parametre
TENS, EMS in MASAŽA TENS: 10; EMS: 9; MASAŽA: 3
55 - 260 μs, odvisno od programa
2 - 120 Hz, odvisno od programa
5 - 90 minut, prilagodljivo glede na program po 1 minuti
+5 °C do +40 °C pri relativni vlažnosti 15 % do 93 %, atmosferski tlak 700 hPa do 1060 hPa
-10 °C do +55 °C pri 10 % do 95 % relativni vlažnosti, atmosferski tlak 700 hPa do 1060 hPa
109 x 54,5 x 23 mm
50 x 50 mm
76 g
88347
4001690 88347 4

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v okviru stalnih izboljšav izdelka. Najnovejša različica teh navodil za uporabo je na voljo na spletni strani www.medisana.com.

Pogoji garancije in popravila
V primeru garancijskega zahtevka se obrnite neposredno na specializirano trgovino ali servisni center. Če morate aparat vrniti, navedite napako in priložite kopijo potrdila o nakupu. Veljajo naslednji garancijski pogoji:

1. Za izdelke **medisana** velja garancija 3 leta od datuma nakupa. V primeru garancijskega zahtevka je treba datum nakupa dokazati s potrdilom o nakupu ali računom.
2. Okvare zaradi napak v materialu ali proizvodnji bodo brezplačno odpravljene v garancijskem roku.
3. Garancijski servis ne podaljša garancijskega roka niti za napravo niti za zamenjane sestavne dele.
4. Iz jamstva so izključeni
 - a. vse poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilnega ravnanja, npr. neupoštevanja navodil za uporabo.
 - b. škoda, ki jo je mogoče pripisati popravilom ali posegom s strani kupca ali nepooblaščenih tretjih oseb.
 - c. poškodbe pri prevozu, ki nastanejo na poti od proizvajalca do potrošnika ali ko je blago poslano na servisni center.
 - d. Rezervni deli, ki so podvrženi običajni obrabi.
5. Odgovornost za neposredno ali posredno posledično škodo, ki jo povzroči naprava, je izključena. je izključena tudi, če je poškodba naprave priznana kot garancijski primer.

Shenzhen Roundwhale Technology Co., Ltd.
Add: 202, 2/F, Building 27, Dafa Industrial Park, longxi community, ulica longgang, okrožje longgang, Shenzhen, Kitajska.
E-naslov: info@roovjoy.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Evropa)
Naslov: Eiffestr. 80, 20537 Hamburg, Nemčija

uvaž in distribuira:
medisana GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, NEMČIJA

Naslov za vročanje najdete na priloženem listu.

