



Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588  
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

## Automata, csukló vérnyomásmérő

Rend.sz.: 85 04 11

- könnyű, lapos készülék tetszetős kivitelben
- szisztolés, diasztolés vérnyomás és a pulzus pontos mérése
- automatikus mandzsettafelpumpálás és leeresztés
- az utolsó mért érték tárolása
- automatikus kikapcsolás kíméli az elemeket
- egyszerű kezelés
- klinikaiag kipróbált

### MEGJEGYZÉS

A mérési eredményekből ne próbáljon önállóan diagnózist felállítani, hanem forduljon az orvoshoz.

### ELŐKÉSZÜLETEK A VÉRNYOMÁSMÉRÉSHEZ

Minden mérés előtt legalább 5 percig lazítani kell, mivel a stressz, mérgeződés és a fizikai munka jelentősen befolyásolja a vérnyomást. Vérnyomásmérés alatt evést, ivást, dohányzást és minden egyéb tevékenységet mellőzni kell.

A készülék a bal csuklón történő mérésre van kialakítva. Mérés előtt vegye le a karórát, ékszert stb. a csuklóról.

Üljön kényelmesen, de egyenesen az asztalnál. A bal kart hajlítsa be úgy, hogy a csukló a szív magasságában legyen.

Most kezdődhet a vérnyomásmérés.

### A KÉSZÜLÉK RÉSZEI (LÁSD KÉP)

Display - kijelző

Gehäuse - ház

Manschette - mandzsetta

Batteriekommer - elemtartó rekesz

Ein/Aus - ki/bekapcsoló

### A KÉSZÜLÉK FELHELYEZÉSE

Helyezze fel a mandzsettát a bal csuklóra úgy, hogy a kijelző az ütőér felett legyen.

Rögzítse a tépőzárat. A mandzsettának közepesen feszesnek kell lennie. Mérésnél a készüléknek a szív magasságában kell lennie.

### A TÁROLT ÉRTÉKEK BEHÍVÁSA

Kapcsolja be a készüléket és várjon 2 másodpercet. A kijelzőn 0 jelenik meg. Nyomja meg újra az Ein/Aus gombot és tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig.

Ekkor a legutóbbi mérés eredménye kb. 3 másodpercig látható. Ez tetszés szerinti gyakorisággal behívható.

### ÚTMUTATÓ AZ ÁPOLÁSHOZ

1. A készülékben precíziós alkatrészek vannak, ezért óvja leeséstől és óvatosan bánjon vele.
2. Óvja a poros környezettől és a közvetlen napsütéstől.
3. A készülék háza speciális műanyagból készült. A szennyeződéseket nedves ruhával távolítsa el, szükség esetén használjon alkoholos ruhát. Ne használjon petróleumalapú tisztítószeret, pl. festékhígítót vagy benzint.
4. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
5. Ne hajlítsa meg és ne nyújtsa túl a mandzsettát.
6. Hegyes és éles tárgyaktól óvja a mandzsettát.
7. Ne nyomja meg az Ein/Aus (be/ki) gombot, ha a mandzsetta nincs feltéve a csuklóra.

### ELEMCSERE

Ha a kijelzőn megjelenik az elem szimbólum, az elem lemerült. Nyissa ki a mandzsettán levő elemtartó rekeszt. Vegye ki a használt elemeket, megfigyelve az elhelyezésüket, és ugyanúgy tegye be az új elemeket. Zárja vissza az elemtartó rekeszt.

### FIGYELEM!

A készülék működéséhez fontos, hogy az elemtartó rekesz teteje szilárdan zárva legyen. A használt elem veszélyes hulladéknak minősül.

### HIBAEHÁRÍTÁS

Szimbólum	Hiba	Hibaelhárítás
Elem	Elem feszültsége	Elemcsere (2xLR03)
szimbóluma	alacsony	
Err	Mérési hiba	Mérést kb. 5 perc múlva megismételni
UL Err	hibás pulzusérték	Mérést kb. 5 perc múlva megismételni

### MŰSZAKI ADATOK

Modell	CE 0123 SC 4000
Mérési módszer	oszcillometriás
Mérési tartomány	vérnyomás: 20-300 Hgmm pulzus: 40-200 /perc
Mérési pontosság	Vérnyomás: ± 3 Hgmm pulzus: ± 5%
Áramforrás	2xLR03 (mikroelem)
Egy elempár kapacitása	kb. 150 mérés
Memória	az utolsó mérés értékét tárolja
Mandzsetta	13,0-21,0 cm csuklókerület
Üzemi hőmérsékleti tartomány	+10 °C ...+40 °C , <85% rel. páratartalom
Raktározási hőmérsékleti tartomány	-10 °C ...+50 °C , <85% rel. páratartalom

### A KÉSZÜLÉK BEVIZSGÁLÁSA

**Fontos:** A készülék utókalibrálását és a mandzsetta cseréjét csak a gyártó vagy a gyártó által felhatalmazott cég végezheti.