

Természetes anyagok

Vaspor, só, aktív szén, \
víz és vermikulit

Eltarthatóság:

Max. 3 évig eltartható. \
Száras és hűvös helyen kell tárolni.

Thermopad hátmelegítő

A Thermopad hátmelegítők textília tapadófelülettel rendelkeznek és a test tetszőleges részén felerősíthetők a ruhára. A hátmelegítők automatikusan aktiválódnak az oxigénnel való érintkezés után, és kellemes meleget bocsátanak ki akár 12 órán keresztül. Jó közérzet és kikapcsolódás szabadidőben, sport- vagy munka közben.

Nincs több fagyoskodás

A Thermopad hátmelegítők ideális kísérők a friss, hideg levegőn végzett aktivitás közben is. Ha az Ön teste gyorsan fájni kezd, a hátmelegítő a helyes megoldás Önnek. A még kellemesebb közérzet érdekében az alkalmazott melegítők száma tetszőlegesen növelhető.

Felhasználás

A csomagolás felnyitását követően először húzza le a védőfóliát. Ezután helyezze a hátmelegítőt a test tetszőleges részén (hát, nyak, has stb.) legalul viselt ruhadarabra (ne ragassza közvetlenül a bőrre!). Fontos egy további szigetelő réteg, hogy a teljes meleget 12 órán keresztül érezhessük.