



**Masažna blazina Medisana MCH**  
**Št. izdelka: 39 83 62**

**Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke za pripravo na zagon in uporabo. Če izdelek predate tretji osebi, poskrbite za to, da ji izročite tudi ta navodila za uporabo.**

Prosimo vas, da pred prvo uporabo pozorno preberete navodila za uporabo in varnostne napotke. Shranite jih, da jih boste lahko kadarkoli znova prebrali.

## Kazalo vsebine

1. Zahvala .....	2
2. Elementi za upravljanje .....	2
3. Varnostni napotki .....	3
4. Vsebina paketa .....	5
5. Uporaba .....	6
6. Čiščenje in vzdrževanje .....	7
7. Odlaganje .....	7
8. Tehnični podatki .....	8

### 1. Zahvala


Spoštovani kupec!

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vam hkrati čestitamo!

Z nakupom ste pridobili kvaliteten izdelek proizvajalca MEDISANA, ki je namenjen masaži na predelu hrbta in sedalne površine.

Za doseg najboljših rezultatov in dolgo življenjsko dobo masažne blazine, vam priporočamo, da dosledno upoštevate ta navodila za uporabo in čiščenje.

### 2. Elementi za upravljanje

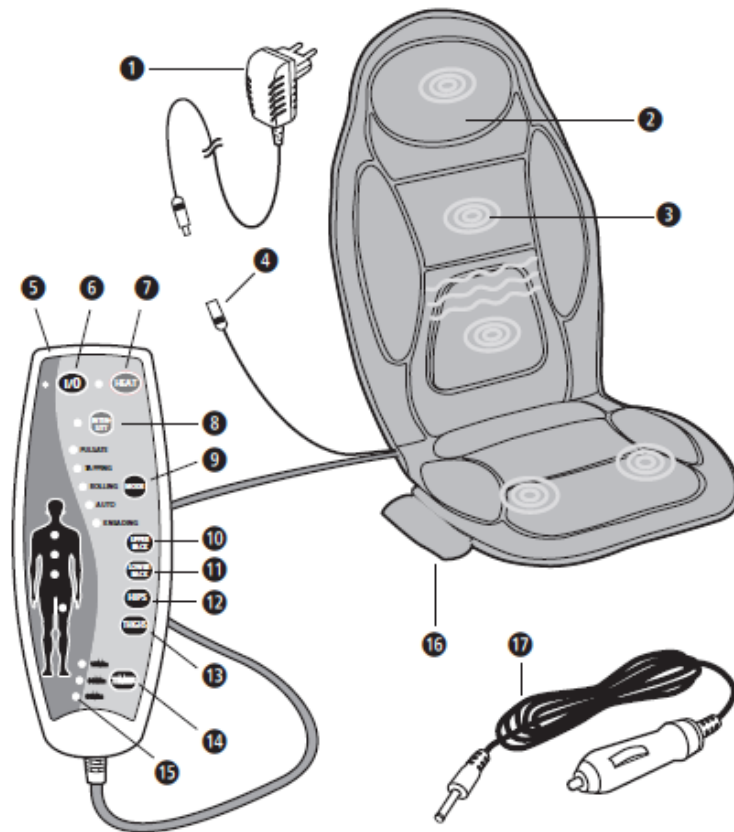

1. Napajalnik
2. Masažna blazina
3. Razporeditev motorjev (5 masažnih motorjev na predelu ramen, hrbta, kolkov in sedalne površine)
4. Priključek za napajalnik in adapter
5. Krmilnik
6. Tipka I/O za vklop iz izklop
7. Tipka HEAT (ko je gretje vklopljeno sveti rdeča LED)
8. Tipka INTENSITY (za nastavitev masažne intenzivnosti)
9. Tipka MODE (za izbiro načina masiranja)
10. Tipka UPPER BACK (masaža v predelu ramen)
11. Tipka LOWER BACK (masaža v predelu hrbta)
12. Tipka HIPS (masaža v predelu kolkov)
13. Tipka THIGHS (masaža v predelu sedalne površine)
14. Tipka TIMER (prednastavitev časa delovanja)
15. 15 kontrolnih LED
16. Torbica za krmilnik
17. Adapter za cigaretni vžigalnik

### 3. Varnostni napotki



#### **POMEMBNI NAPOTKI! OBVEZNO UPOŠTEVAJTE!**

**Pred uporabo obvezno preberite navodila za uporabo in varnostne napotke!**

#### Razlaga simbolov



Ta navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne informacije v zvezi z delovanjem in pravilno uporabo. V primeru neupoštevanja obstoji nevarnost poškodb ali okvare izdelka.



#### **OPOZORILO!**

Simbol opozarja na nevarnosti, ki lahko vodijo do poškodb uporabnika!



#### **POZOR!**

Simbol opozarja na nevarnosti, ki lahko vodijo do poškodb ali okvare naprave!



**NAPOTEK!** Simbol opozarja na dodatne informacije in namige.



Zaščitni razred II



LOT-številka



Proizvajalec

## Varnostni napotki:



### oskrba s tokom

- Preden napravo priključite na omrežje, preverite, če se napetost, navedena na tipski ploščici, ujema z napetostjo na omrežju.
- Vtič lahko priključite v vtičnico le, ko je naprava izklopljena.
- Uporabljajte le priloženi napajalnik.
- Napajalnik, kabel, krmilnik in masažno blazino varujte pred vročino, vročimi površinami, mokroto in vlago. Napajalnika se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če vam naprava pade v vodo, se je ne dotikajte, temveč nemudoma potegnite vtič iz električne vtičnice.
- Napravo po končani uporabi obvezno ločite od električnega omrežja. Pri tem nikoli ne vlecite za kabel, temveč vedno primite z eno roko za vtič in z drugo za vtičnico.
- Masažne blazine nikoli ne nosite, vlecite ali vrtite tako, da bi jo pri tem držali za kabel, napajalnik ali krmilnik.
- Če sta napajalnik ali kabel poškodovana, naprave ne uporabljajte. Iz varnostnih razlogov vsa morebitna potrebna popravila prepustite za to usposobljenemu strokovnjaku.
- Pazite, da kabel ni nameščen tako, da bi se obenj lahko spotaknili. Pazite tudi, da ni prepognjen, zagozden ali zavit.

### osebe

- Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, osebe s pomanjkanjem izkušenj in/ali premalo znanja, razen, če jih nadzoruje zanje odgovorna oseba oz. jih seznanijo s pravilno uporabo.
- Naprava ni igrača, zato jo varujte izven dosega otrok!
- Naprave ne uporabljajte v podporo ali kot namestilo za medicinske namene. Nekatere kronične bolezni in simptomi se z uporabo naprave lahko le še poslabšajo.
- Naprave ne uporabljajte oziroma se pred njeno uporabo posvetujte z zdravnikom, če:
  - ste noseči;
  - imate srčni spodbujevalnik, umetne sklepe ali elektronske implantate;
  - trpite za eno ali več boleznimi ali težavami, kot so: motnje v prekrvavitvi, krčne žile, odprte rane, udarnine, poškodbe na koži, vnetje ven.
- Če ob uporabi naprave občutite bolečine ali se vam zdi masaža neprijetna, nemudoma prenehajte z uporabo in se o težavah posvetujte z izbranim zdravnikom.
- Ko je naprava priključena na električno omrežje, je nikoli ne pustite delovati brez nadzora.
- Previdnost pri uporabi toplote: naprave ne uporabljajte na delih telesa s slabim krvnim pretokom ali na mestih, neobčutljivih na vročino. **Nevarnost opeklin!**
- V primeru terapevtskih vprašanj v zvezi z uporabo naprave, se po pomoč obrnite na izbranega zdravnika.
- Če ste v zdravniški obravnavi in/ali uporabljate medicinske naprave ter občutite nepojasnjene bolečine, se pred uporabo naprave posvetujte s svojim zdravnikom.

### pred uporabo naprave

- Pred vsako uporabo skrbno preglejte napajalnik, kabel, krmilnik in masažno sedalo. V kolikor opazite najmanjše spremembe in/ali poškodbe, naprave na uporabite.

- Naprave prav tako ne uporabljajte, če vam je kateri izmed sestavnih delov padel z višine ali je bil izpostavljen mokroti ali vlagi. V takem primeru napravo pred uporabo prepustite v pregled kvalificiranemu strokovnjaku.

### **delovanje naprave**

- Napravo uporabljajte izključno za predviden namen, skladno z navodili za uporabo.
- V primeru uporabe, drugačne od opisane v teh navodilih, se prekine možnost uveljavljanja garancije.
- Ko je naprava priključena na omrežje, jo nikoli ne pustite delovati brez nadzora.
- Najdaljši čas uporabe na uporabnika znaša 60 minut.
- Pazite, da naprava ne pride v stik z ostrimi ali koničastimi predmeti.
- Naprave nikoli ne postavljajte v bližino električnih peči za ogrevanje ali drugih toplotnih virov.
- Masažne blazine nikoli ne uporabljajte, ko je ta zložena ali zmečkana.
- Na masažno blazino ne stopajte.
- Napajalnika se nikoli ne dotikate z mokrimi ali vlažnimi rokami, prav tako se ga ne dotikajte, ko stojite v vodi in imate suhe roke.



**Naprava ni namenjena uporabi v gospodarske ali medicinske namene. V primeru zdravstvenih pomislekov, se pred uporabo masažne blazine posvetujte z izbranim zdravnikom.**



#### **VARNOST V PROMETU**



**Varnost ima v prometu največji pomen! Uporaba masažne blazine med vožnjo ni dovoljena! Uporabljajte jo lahko le, ko se vozite kot sopotnik ali pa avto miruje.**

**Masažno blazino uporabljajte le v zaprtem prostoru ali v vozilu.**

**Masažne blazine ne uporabljajte v vlažnih prostorih (npr. v kopalnici).**

### **čiščenje in vzdrževanje**

- Naprava ne zahteva posebnega vzdrževanja. V primeru težav preverite, če je napajalnik pravilno povezan.
- Sami lahko napravo zgolj očistite, v kolikor se zgodi, da se pojavijo motnje v delovanju, pa jo ne popravljate sami, saj se v tem primeru prekine garancijski rok. Napravo obvezno prepustite v pregled kvalificiranemu strokovnjaku.
- Če na napravi, kablu ali drugih sestavnih delih opazite znake poškodb, če ne deluje pravilno, je padla z višine ali pa je bila izpostavljena vlagi, jo v nobenem primeru ne uporabite. Nevarnost poškodb! Napravo prepustite v pregled kvalificiranemu strokovnjaku.
- Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Če v napravo zaide voda, nemudoma izklopite vtič iz električne vtičnice.



**Naprave ne potaplajte v vodo!**

**Naprave ne čistite s kemičnimi sredstvi!**

## **4. Vsebina paketa**

Prosimo, da pred prvo uporabo preverite vsebino paketa, prav tako preverite neoporečnost posameznih sestavnih delov. V dvomu naprave ne uporabite, temveč jo prepustite v pregled našemu strokovnjaku.

Paket mora vsebovati:

- masažno blazino Medisana MCH;
- krmilnik;
- napajalnik;
- adapter za cigaretni vžigalnik;
- navodila.

Embalažo je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati. V kolikor je ne potrebujete, jo odložite v skladu z veljavnimi predpisi.



#### **OPOZORILO!**

**Ovojno folijo varujte izven dosega otrok. Nevarnost zadužitve!**

## **5. Uporaba**

### **Pričetek delovanja**

- Masažno blazino (2) namestite na visok stol ali sedež (npr. avtomobilski) in jo pritrdite s trakovi.
- Napajalnik (1) oziroma adapter (17) povežite s kablom, ki je pridružen masažni blazini.
- Vtič napajalnika (1) vstavite v omrežno vtičnico oziroma vstavite vtič adapterja (17) v vtičnico v avtomobilu (cigaretni vžigalnik).
- Usedite se na blazino (2) in se seznanite z njenim upravljanjem.

### **Upravljanje**

Masažna blazina ima za doseg ciljne obravnave 4 masažne cone, ki se nahajajo na območju ramen, hrbta, pasu in sedalne površine. Za vsako območje masiranja so na voljo druge oblike masaže z različnimi intenzivnostmi. Timer omogoča avtomatični izklop naprave po prednastavljenem času (15, 30 ali 60 minut).

### **Tipke na krmilniku**

- **Tipka I/O (13) – oskrba s tokom**

Tipko pritisnite za vklop in izklop.

Če želite po izteku nastavljenega časa (timer) in izklopu naprave, nastavitve obnoviti, pritisnite tipko I/O ali tipko HEAT (7).



**OPOZORILO! Pazite, da ne presežete najvišjega dovoljenega časa uporabe blazine, ki znaša 60 minut.**

- **Tipka HEAT (7)**

Pritisnite tipko HEAT (7) za vklop gretja (rdeča LED sveti). Predel pasu se segreje. Če tipko HEAT pritisnete ponovno, se gretje izklopi. Gretje lahko deluje ločeno ali skupaj z masažno funkcijo.

- **Tipka INTENSITY (8)**

Tipko uporabite za nastavitev zelene intenzivnosti.

- **Tipka MODE (9)**

Izberete lahko eno izmed naslednjih funkcij (od 1 do 5):

**AUTO:** običajni način masiranja, ko je naprava vklopljena. Vrste masaž se samodejno vrstijo ena za drugo. Vsak pritisk na tipko MODE pomeni preklon na naslednjo obliko masiranja.

**KNEADING (gnetenje):** po tem, ko napravo vklopite, pritisnite tipko MODE. Masaža je podobna Shiatsu masaži.

**PULSATE (utripanje):** po tem, ko napravo vklopite, dvakrat pritisnite tipko MODE. Masažna motorja delujeta izmenično.

**TAPPING (potrkavanje):** po tem, ko napravo vklopite, trikrat pritisnite tipko MODE.

**ROLLING (valovanje):** po tem, ko napravo vklopite, štirikrat pritisnite tipko MODE. Motorji ustvarjajo masažni učinek valovanja.

**AUTO:** \_ \_ \_

- **Masažna območja**

Izbirate lahko med 4 masažnimi območji v katerikoli kombinaciji.

**(10)** Območje ramen (UPPER BACK)

**(11)** Območje hrbta (LOWER BACK)

**(12)** Območje kolkov (HIPS)

**(13)** Stegna (THIGHS)

S pritiskom na pripadajočo tipko, lahko izberete ali izklopite masažno območje. Ko je določeno masažno območje aktivirano, sveti pripadajoča LED.

- **TIMER (14)**

Pritisnite tipko za nastavitev enega izmed prednastavljenih časov masiranja: 15, 30 ali 60 minut. LED sveti.

## 6. Čiščenje in vzdrževanje

- Pred čiščenjem naprave se prepričajte, da je ta izklopljena iz električnega omrežja. Počakajte tudi, da se naprava ohladi.
- Masažno blazino lahko čistite z rahlo navlaženo gobo. Za čiščenje nikoli ne uporabljajte krtač, agresivnih čistilnih sredstev, bencina, razredčil ali alkohola. Sedež po čiščenju osušite s suho in mehko krpo.
- Naprave ob čiščenju nikoli ne potaplajte v vodo, prav tako pazite, da vanjo ne zaide voda.
- Preden napravo ponovno uporabite, počakajte, da se popolnoma posuši.
- Če je kabel zavit, ga odvijte.
- Napravo shranjujte v originalni embalaži v čistem in suhem prostoru.

## 7. Odlaganje



Naprave po izteku njene življenjske dobe ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Električne in elektronske naprave, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi ali ne, prinesite v zbirališča tovrstnih odpadkov ter s tem omogočite odlaganje na okolju prijazen način.

## 8. Tehnični podatki

Ime in model .....	Masažna blazina MEDISANA MCH
Oskrba s tokom.....	100-240 V~ 50/60 Hz 400 mA
Napajalnik .....	12 V = 800 mA
Adapter za cigaretni vžigalnik .....	12 V = 3 A
Poraba toka .....	pribl. 9,6 W
Najdaljši čas delovanja .....	maks. 60 minut
Timer .....	po pribl. 15, 30 in 60 minutah
Pogoji delovanja .....	samo v suhih prostorih
Pogoji shranjevanja .....	v hladnih, suhih prostorih
Dimenzije .....	pribl. 110 x 48 cm
Teža .....	pribl. 1,1 kg (brez napajalnika)
Dolžina omrežnega kabla .....	pribl. 1,8 m
Dolžina adapterskega kabla .....	pribl. 1,8 m



Z namenom izboljšave izdelka si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega opozorila.





## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Masažna blazina  
Kat. št.: 398362

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

**Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.