



NAVODILA ZA UPORABO

Lupa z LED-svetilko Eschenbach Mobilux 15110

Kataloška št.: 82 66 87



Kazalo

Slika	2
Uvod	2
Varnostni napotki	2
Vsebina paketa	3
Priprava naprave na delovanje	3
Uporaba lupe Mobilux	3
Tehnični podatki	4
Napotki za vzdrževanje	4
Garancijski list	5

Slika



Uvod

Kupili ste kakovosten izdelek proizvajalca Eschenbach, ki je bil proizveden z najsodobnejšim proizvodnim postopkom v Nemčiji. Čestitamo vam za to odločitev. Pred prvo uporabo pozorno preberite ta navodila za uporabo, da se seznanite z vsemi funkcijami naprave. Lupa Mobilux je primerna za uporabo kot pripomoček za vid, saj prikazuje povečano sliko.

Varnostni napotki

- Ta izdelek ni igrača! Otroci se ne smejo nenadzorovano nahajati v njegovi bližini!
- Nevarnost zadušitve! Ta izdelek vsebuje majhne sestavne dele, ki jih otroci lahko pogoltnejo!



- **Nevarnost požara!** Leče v optičnih napravah lahko pri nepravilni uporabi in shranjevanju z "učinkom zbiralne leče" povzročijo znatno škodo! Poskrbite za to, da optične leče ne ležijo na soncu brez pokrova!
- **Nevarnost zaslepitve in telesnih poškodb!** Z optičnimi napravami nikoli ne glejte v sonce ali v druge zelo svetle vire svetlobe! Ne glejte v vir svetlobe na spodnji strani ohišja!
- **Zaščitite svojo lupo s svetilko pred sunki ali udarci, vlago in prekomerno toploto.** Lupe s svetilko nikoli ne polagajte na radiatorje ali na sonce!
- **Redno preverjajte baterije.** Iztečene baterije lahko povzročijo škodo na napravi, pri stiku s kožo pa lahko povzročijo draženje.
- **Takoj ko so baterije prazne ali pa naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije iz baterijskega predala.**
- **Lupe Mobilux nikoli ne izpostavljajte mokroti!**
- **Na te nevarnosti opozorite tudi druge osebe – predvsem otroke!**

Vsebina paketa

- Lupa Mobilux
- Rumeni filter
- 2 bateriji (tipa AA/LR6)
- Etui

Priprava naprave na delovanje

Za enakomerno osvetlitev čtiva ima vaša leča Mobilux vgrajeno zmogljivo LED. Napajanje LED poteka z 2 baterijama (tipa AA/LR6). Pred prvo uporabo morate vstaviti baterije.

1. Pri tem odprite pokrov baterijskega predala (2).
2. Vstavite 2 bateriji in pri tem upoštevajte usmeritev, ki je navedena v baterijskem predalu. Upoštevajte pravilno polarnost, sicer naprava ne bo delovala.
3. Ponovno zaprite baterijski predal.

- Baterije in akumulatorji ne sodijo med gospodinjske odpadke! Poskrbite za pravilno odstranjevanje!

Uporaba lupe Mobilux

Lupo Mobilux lahko uporabljate v kombinaciji s svojimi bralnimi očali.

1. Lečo Mobilux držite na sredini besedila, ki ga želite prikazati povečano.
2. Z lupo Mobilux dosežete optimalen prikaz, če upoštevate razdaljo med očesom in lupo, ki je primerna za povečavo, ki jo uporabljate. To vrednost (v mm) najdete v poglavju „Tehnični podatki“ pod točko „Razdalja med lupo in očesom“ ter na svoji lupi Mobilux nad stikalom.
3. LED-osvetlitev aktivirate tako, da stikalo (3) potisnete v smeri leče (4).
4. Po uporabi LED-osvetlitev spet deaktivirate tako, da stikalo (3) potisnete v smeri proč od leče (4).

Opomba: Ko LED brli, so baterije skoraj prazne in jih je treba nadomestiti z novimi. Pri tem upoštevajte napotke v poglavju „Priprava naprave na uporabo“.

Če vam barva svetlobe ni všeč, lahko na LED nataknete priložen rumeni filter (1) tako kot je prikazano na sliki na strani 2.

Za zaščito leče je vaši leči Mobilux priložen etui, ki ga lahko s pomočjo traka za pas pritrdite na pas.

Če želite svojo lečo Mobilux obesiti okoli vratu, se na koncu ročaja nahaja ušesce, skozi katerega lahko speljete trak za obešanje, ki ga lahko naročite posebej (št. izd. proizvajalca 15981).

Tehnični podatki

Številka izdelka proizvajalca	Ø leče	Povečava	Razdalja med lupo in očesom
15112	60 mm	12,0 dpt/3,0x	250 mm
15113	75 x 50 mm	10,0 dpt/3,5x	250 mm
15114	75 x 50 mm	16,0 dpt/4,0x	180 mm
151141	60 mm	16,0 dpt/4,0x	150 mm
15115	58 mm	20,0 dpt/5,0x	140 mm
15117	35 mm	28,0 dpt/7,0x	60 mm
151110	35 mm	38 dpt/10,0x	40 mm
151112	35 mm	50 dpt/12,5x	40 mm

Napotki za vzdrževanje

- Za čiščenje lupe Mobilux ne uporabljajte milnic, ki vsebujejo mehčalce, alkoholnih ali organskih topil in abrazivnih čistilnih sredstev! Sicer lahko uničite lečo!
- Leče Mobilux ne čistite v ultrazvočnem čistilniku ali pod tekočo vodo!
- Lečo Mobilux čistite z mehko krpo brez kosmov (npr. s čistilno krpico za očala). Pri trdovratnejši umazaniji (npr. prstni odtisi) čistilno krpo malce navlažite.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Lupa z LED-svetilko**
Eschenbach Mobilux 151110
Kat. št.: **82 66 87**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.