



0,5-LITRSKO DENTALNO ČISTILO ZA ZOBNE PROTEZE, ZOBNE APARATE ITD.

Št. izdelka: 826812

KAZALO

1	LASTNOSTI.....	3
2	UPORABA.....	3
3	SESTAVA.....	3
4	OZNAČITEV USTREZNO Z UREDBO O NEVARNIH SNOVEH.....	3

1 LASTNOSTI

Čistilno sredstvo EM-070 intenzivira kot dodatek v ultrazvočni kopeli postopek čiščenja. Brez problemov odstrani vse umazanije pri zobnih protezah in zobnih aparatih. Primeren je tudi za čiščenje delov iz legiranega jekla, žlahtnih kovin, porcelana, stekla in umetne mase v ultrazvočni kopeli. Možna je tudi odstranitev cementa in ostankov mavca.

2 UPORABA

Glede na stopnjo umazanosti dajte v kopel za čiščenje 5 ml čistilnega sredstva EM-070. Pokrovček za odmerjanje znaša približno 5 ml. Po končanem postopku čiščenja napravo za čiščenje temeljito sperite z vodo.

3 SESTAVA

Kombinacija fosforjeve in citronske kisline. pH vrednost 1% raztopine znaša približno 2,2. Brez mravljinčje kisline. Uporabite samo izven območja ust. Preprečite škropljenje po koži, očeh in obleki.

4 OZNAČITEV USTREZNO Z UREDBO O NEVARNIH SNOVEH

Povzroči razjede. Pri stiku z očmi, oči temeljito sperite z veliko vode in pojdite k zdravniku. Pri delu nosite primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščitna očala / zaščitno obraza. Pri nesreči ali slabem počutju se takoj obrnite na zdravnika (če je možnosti pokažite etiketo). Na recikliciranje dajte samo prazno embalažo.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: _____

Kat. št.: _____

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.