



NAVODILA ZA UPORABO

Naprava za zdravljenje pikov žuželk Riemser Bite Away

Kataloška št.: 13 83 403



Kazalo

Učinkovanje	2
Princip delovanja	2
Oblike	2
Primeri uporabe	2
Koraki uporabe	2
Garancijski list	3

Učinkovanje

- Pri takojšnji uporabi prepreči oz. zmanjša bolečino, srbež in otekanje.
- Pri kasnejši uporabi (tudi čez nekaj ur) se bolečina in srbež ustavita oz. zmanjšata. Oteklina se zelo hitro zmanjša.

Princip delovanja

- Koncentrirana toplota (50 °C – 53 °C) prekine zaporedje reakcij in ustavi izločanje histamina.

Oblike

- Oblika pisala (dizajn kobre) in kompaktna oblika (dizajn miši)

Napravo Bite away® lahko kupite v lekarnah ali v spletni trgovini www.stichheiler.de po priporočeni maloprodajni ceni 29,90 €.

Primeri uporabe

- Pri pikih in ugrizih žuželk kot so npr. ose, obadi, sršeni, komarji in pri stiku z morskimi živalmi kot so žgoči klobučnjaki in navadni morski zmaji

Koraki uporabe

- Prislonite grelno površino na pik in rahlo pritisnite
- Pritisnite tipko za začetek:
 - Tipka za 3-sekundno terapijo: za otroke in odrasle z občutljivo kožo
 - Tipka za 6-sekundno terapijo: za odrasle (priporočljivo npr. pri osah)
- Terapija se začne z akustičnim signalom in svetenjem LED ter konča s ponovnim akustičnim signalom in prenehanjem svetjenja LED
- Napravo Bite Away® odstranite od mesta terapije
- Napravo Bite Away® dezinficirajte s primernim sredstvom

Pri pikih os, obadov in sršenov je priporočljiva dva- do trikratna uporaba s 5- do 10-sekundnim premorom. Naprave Bite Away® ne uporabljajte na očeh!

Medicinski pripomoček je dermatološko testiran (visoka učinkovitost, brez opeklin).

Prosimo, upoštevajte celotna navodila za uporabo.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Naprava za zdravljenje pikov žuželk Riemser Bite Away**
Kat. št.: **13 83 403**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.