



NAVODILA ZA UPORABO

Alkotest ACE Innomark Gamma

Kataloška št.: 23 45 266



Kazalo

Pomembni napotki	2
Pomembni napotki glede kalibracije.....	2
Kateri dejavniki vplivajo na natan��nost meritev?	3
Pomembni napotki glede izvajanja testiranja in samopresoje	3
Odgovornost avtorjev	4
Uvod	5
Opomba glede merskih enot v posameznih dr��zavah	5
Vsebina paketa	5
Sestavni deli	6
Doseganje karseda natan��nega rezultata	6
Priprave na testiranje.....	7
Izvajanje testiranja	7
ACE Instruments priporo��a.....	8
Pomembni napotki	8
Samo uporaba originalnih ustnikov ACE Instruments	8
ACE Instruments opozarja	9
Opozorila	9
Kalibracija	9
Napotki glede baterije	10
Tehni��ni podatki*	10
Varnostni napotki.....	11
Garancija in odgovornost.....	11
Garancijski list	13

Pomembni napotki

Pomembni napotki glede kalibracije

Vsak alkotest, ki ste ga kupili pri proizvajalcu ACE Instruments, lahko ACE tudi kalibrira. Seveda izvajamo tudi kalibracijo naprav, ki ste jih kupili kje drugje, v kolikor so te naprave po izvedbi identične napravam, ki jih prodaja ACE.

Datum naslednje potrebne kalibracije vidite na nalepki za kalibracijo, ki se nahaja na vašem alkotestu. Če nalepka manjka, potem je treba izvesti kalibracijo 6 mesecev po datumu nakupa: npr. datum nakupa: 13.05. = naslednja kalibracija 13.11. in nato 13.05. naslednje leto.

Napravo lahko pošljete na kalibracijo na naslov servisne slu  be, ki ga najdete na spletni strani www.alkomat.net.

Zakaj je potrebna kalibracija?

Kalibracija ni nujno potrebna, vendar se natan  nost vgrajenega senzorja brez kalibracije ves   as zmanj  uje. Poleg tega v primeru, da se ne dr  žite intervalov za kalibracijo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Kateri dejavniki vplivajo na natan nost meritev?

- Pogosteje kot uporabljate alcotest, bolj se zamika ni elna to ka.
- Pri visokih koncentracijah alkohola se ni elna to ka  e hitreje zamika.
- Pri napravah, ki se uporabljajo malo ali pa se sploh ne uporabljajo, se občutljivost senzorja prav tako zmanj uje.

Proizvajalec ACE Instruments priporo a, da najmanj enkrat (1x) na teden izvedete testiranje z alcotestom, ne glede na to,  e ste pili alkohol ali ne. Poleg tega je treba za ohranjanje natan nosti meritev napravo redno kalibrirati.

Prosimo, da upo tevate tudi razli ne dejavnike, ki vplivajo na rezultat meritve:

- Koli ina alkohola
-  asovno obdobje u ivanja alkohola
- Spol
- Starost
- Te a
- Telesna vi ina
- Pivske navade
- Zdravstveno stanje
- Vitalnost jeter
- Velikost plju 
- U ivanje hrane med pitjem alkohola
- Vpliv zdravil

Pomembni napotki glede izvajanja testiranja in samopresoje

Po zadnjem po irku alkohola morate najmanj 15 minut po akati, sicer se lahko v ustni votlini  e nahaja preostali alkohol, ki lahko vpliva na rezultat meritve. Prav tako se morate pred testiranjem izogibati kajenju, saj cigaretni dim  koduje senzorju.

Za vsako testiranje je treba uporabiti nov ustnik. Ne samo iz higienskih razlogov, temve  tudi zato, ker lahko uporabljen ustnik vpliva na rezultat naslednje meritve. V ustniku se lahko nahaja preostali alkohol, ki pri ponovni uporabi istega ustnika vpliva na rezultat novega testiranja (s tem lahko npr. pri trezni osebi rezultat prikazuje, da je ta oseba pod vplivom alkohola).

Ko se na prikazovalniku pojavi napis „FLOW“ oz. „FLo“, potem izdihan zrak ni zadostoval ali pa je bilo izdihovanje prehitro zaklju eno. Pri izdihovanju zraka pribl. 4 sekunde konstantno pihajte in to najboljše tako, kot da bi  vi gali brez zvoka. Z izdihovanjem zraka zaklju ite, takoj ko naprava dvakrat zapiska.

ACE, proizvajalec: ACE Handels- und Entwicklungs GmbH, Staufenstr a e 1, 83395 Freilassing, Nem cija.

Ko ista oseba izvede 2 zaporedni testiranja, potem naj med obema testiranjema najmanj 3 minute po aka. Pri prekratkem premoru so lahko namre  prikazane razli ne izmerjene vrednosti. Zrak, ki ga izdihate iz plju , po enem testiranju ni ve  nasi en z enako koncentracijo alkohola kot pri testiranju, ki ste ga izvedli tik pred tem. S tem takoj nje ponovno testiranje prikazuje ni jo izmerjeno vrednost.

Vse vrednosti, ki jih izmerite s tem alkotestom, vedno slu ijo samo kot orientacija in niso pravno zavezujo e.

Zakaj se subjektivni občutek vinjenosti in rezultat meritve pogosto ne (moreta) skladati?

Pri alkotestu obstaja zelo veliko razli nih dejavnikov, ki vplivajo na vi ino izmerjene vrednosti. Poleg spola, starosti, telesne vi ine in telesne te e sem sodijo tudi dele  telesne ma  obe ter dele  telesne teko ine.

Poleg tega je treba upo tevat tudi splo no fizi no in psihi no stanje oz. stanje na posamezni dan. Prav tako lahko na izmerjeno vrednost vplivajo vrsta obroka pred testiranjem (vrsta vsebine in stanje napolnjenosti  elodca) in zau ita zdravila.

Med dejavnike vpliva sodijo tudi vrsta pija e (odstotkovni dele  alkohola v pija i ter vsebnost ogljikove kisline in sladkorja), hitrost pitja in individualno trajanje razgradnje alkohola v telesu, ki je odvisno od testirane osebe.

Nekateri ljudje imajo hitro pove ano koncentracijo alkohola v krvi, pri nekaterih pa traja dalj  asa, da je mo no ugotoviti vinjenost. V roku 15 minut se v telesu nahaja pribl. 40-50 % zau itega alkohola, po 30 minutah je to 65 %, najkasneje  ez 70 minut pa telo absorbira 100 % zau itega alkohola. Vendar je pri tem treba upo tevat tudi to, da nekateri ljudje – delno je to genetsko pogojeno – koncentracijo alkohola v krvi hitreje razgradijo, medtem ko imajo drugi tudi ko pote e ve   asa  e vedno pove ano koncentracijo alkohola v krvi.

Odgovornost avtorjev

Podjetje ACE Handels- und Entwicklungs GmbH (ACE Instruments) je informacije, ki so navedene v teh navodilih za uporabo, pripravilo vestno in z domnevo, da so pravilne. Vendar pa avtorji ne morejo prevzeti odgovornosti za rabo v skladu z napotki v teh navodilih za uporabo in posledice, ki iz tega sledijo. Avtorji niso odgovorni za stro ke, ki nastanejo v povezavi s  kodo, ki je posledica upo tevanja informacij, ki jih vsebuje ta dokument. Pridr ujemo si pravico do sprememb teh informacij brez vnapre nje najave.

Uvod

Najlepša hvala za nakup našega alkotesta Innomark Gamma! Gre za alkotest z elektrokemičnim senzorjem, ki je enostaven za upravljanje. Naprava meri koncentracijo alkohola v izdihanem zraku in na podlagi tega izračuna koncentracijo alkohola v krvi. Ta naprava nudi rezultate testiranja z merilno toleranco +/- 0,08 ‰ (promila) pri referenčni vrednosti 0,50 promila in temperaturi okolice 25 °C. Merska enota ‰ (promil oziroma g/L) = osnovna nastavitvev v EU.

Merilni rezultati v promilih so prikazani v obliki 4-mestne številke vrednosti in jih lahko interpretirate 1:1 (na primer prikazovalnik prikazuje vrednost 0,36 = 0,36 promila).

Senzor, ki je vgrajen v napravo, je možno kalibrirati. Za ohranjanje merilne natančnosti te naprave in za ohranitev pravice do uveljavljanja garancije za senzor priporočamo redno kalibracijo. Napravo lahko pošljete na kalibracijo na naslov servisne službe, ki ga najdete na spletni strani www.alkomat.net.

Napravo lahko uporabljate samo v skladu z napotki v teh navodilih za uporabo. Vse izmerjene vrednosti, ugotovljene s tem alkotestom, vedno služijo samo kot orientacija in niso pravno zavezujoče. Testiranje izdihanega zraka je treba izvajati z uporabo natičnih ustnikov. Za vsako testiranje je treba uporabiti nov ustnik – ne samo iz higienskih razlogov, temveč tudi za preprečitev popačenih izmerjenih vrednosti.

Opomba glede merskih enot v posameznih državah

Stranke v Veliki Britaniji prejmejo alkotest z osnovno nastavitvijo mg/L, stranke v ZDA pa za osnovno nastavitvijo % BAC. Prosimo, da se po potrebi pozanimate o aktualnih mejah alkohola v posamezni državi, ki so na voljo na primer na spletni strani ministrstva za promet ali avtomobilskih klubov.

Vsebina paketa

- 1 alkotest Innomark Gamma z elektrokemičnim senzorjem
- 1 litijevo-ionska akumulatorska baterija (3,7 V)
- 1 kabel Micro USB (Micro 5,0 V/DC)
- 3 ustniki
- 1 kratka navodila (v nemškem in angleškem jeziku)
- 1 navodila za uporabo (večjezična)

Sestavni deli



1. Ustnik in odprtina za pritrditev ustnika
2. Digitalni LCD-prikazovalnik
3. Tipka za vklop
4. Odvod zraka (ne pokrivajte)
5. Menijski tipki (za razli ne nastavitve naprave)
6. Priklju ek za polnilni USB-kabel
7. Stikalo za aktivacijo napajanja

Doseganje karseda natan nega rezultata

- A) Po zadnjem po irku alkohola s testiranjem po akajte najmanj 15 minut. V tem  asu ne jejte, pijte in kadite.
- B) Ne odpirajte ohi ja.
- C) Alkotesta ne shranjujte na hladnem, vro em, vla nem mestu ali na mestu s slabim prezra evanjem.
- D) Alkotest shranjujte izven dosega otrok.
- E) Po dalj em  asu shranjevanja izvedite tri predhodna testiranja,  ele nato izvedite dejanski alkotest.
- F) Pazite, da vam alkotest ne pade iz rok.
- G) Ko se zmogljivost baterije zmanj a, jo zamenjajte.
Zmanj ana kapaciteta baterij vodi do napa nih rezultatov testiranja.
- H) Ne izvajajte testiranja v glasnih prostorih (zvo ni valovi motijo senzor), prostorih, kje je prisoten prepih, ali pa v prostorih s slabim zra enjem.

- I) Po rezultatu testiranja v vi ini 1,00 promila ali ve  sensor potrebuje dalj  asa, da je spet pripravljen na merjenje. V tem primeru do naslednjega testiranja po akajte najmanj tri minute.
- J) Ne izvajajte testiranja v zelo hladnem, zelo vro em okolju ali v okolju, kjer je prisoten dim in ni na voljo zra enje.
- K) Alkotest shranjujte tako, da ni mo en vdor praha in teko in.
- L) Ne pihajte premo no v napravo, saj s tem  kodite senzorju (predvsem takrat,  e s pihanjem v napravo vdre velika koli ina sline).

Priprave na testiranje

1. Litijevo-ionsko akumulatorsko baterijo (3,7 V) v napravi napolnite s pomo jo prilo enega polnilnega kabla. Ob za etku postopka polnjenja se na prikazovalniku pojavi prikaz „CH“, hkrati pa utripa prikaz za stanje baterije.  ez nekaj sekund oba prikaza izgineta. Takoj ko je postopek polnjenja zaklju en, se na prikazovalniku pojavi napis „FULL“ (Polno). Nato stikalo pod priklju kom za kabel potisnite navzgor (pojavi se zeleno ozadje, ki signalizira, da je naprava pripravljena na uporabo).
2. Natakните ustnik na stransko odprtino za pritrditev ustnikov (= odprtina na levi strani naprave gledano od spredaj). Prepri ajte se, da je ustnik dobro fiksiran. Za vsakega testiranca uporabite nov ustnik (iz higienskih razlogov in za ohranjanje natan nosti merjenja, saj lahko uporabljen ustnik v svoji notranjosti vsebuje preostali alkohol).

Izvajanje testiranja

1. Kratko pritisnite tipko za vklop na sprednji strani alkotesta. Naprava 2 x zapiska, na prikazovalniku pa se pojavi prikaz „ALCO“ in prikaz za stanje baterije.
2. Ponovno 1 x kratko pritisnite tipko za vklop. Za kratek  as se pojavi prikaz „SH“ (= Sensor Heating = segrevanje sensorja), nato se pojavi prikaz „SH99“, temu pa sledi od tevanje od 30 do 0 ( e sensor potrebuje ve   asa za segrevanje, potem se od tevanje za ne pri 99). Med od tevanje naprava piska v sekundnem intervalu, na prikazovalniku pa se izmenjujeta prikaza „READY“ (Pripravljenost) in „BLOW“ (Pihajte).
3. Takoj ko se od tevanje za ne, lahko za nete s testiranjem izdihanega zraka. 4 sekunde enakomerno pihajte v ustnik, ki ste ga pred tem namestili. Pri tem preprosto po asi in brez prekinjanja izdihujete (podobno kot  e bi  vi gali). Med jemanjem vzorca naprava ves  as piska.
4. Takoj ko naprava neha piskati in nato  e 2 x zapiska, je testiranje zaklju eno.  e ste prekinili s pihanjem ali pa ste pihali pre ibko, potem se na prikazovalniku pojavi prikaz „FLO“. V tem primeru ponovni izvedite testiranje in pri tem pritisnite in 2 sekundi dr ite tipko za vklop.
5. Po uspe nem jemanju vzorca naprava analizira merilni rezultat. Pri tem se na prikazovalniku za kratek  as pojavi prikaz „Anly“, temu pa sledi merilni rezultat v promilih (= privzeta nastavitve merske enote). Merilni rezultat je prikazan pribli no 60 sekund, nato pa se na prikazovalniku ponovno pojavi prikaz „ALCO“. Za novo testiranje 1 x kratko pritisnite tipko za vklop.

Opomba: Naprava se  ez pribli no 90 sekund samodejno izklopi. Za ponovno testiranje preprosto 1 x kratko pritisnite tipko za vklop. Napravo lahko kadarkoli tudi ro no izklju ite, tako da pritisnete in pribli no 4 sekunde dr ite tipko za vklop.

ACE Instruments priporo a

- Za vsakega testiranca vedno uporabite nov ustnik!
ACE Instruments ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli  kodo, ki lahko nastane zaradi uporabe enega ustnika s strani ve  oseb in za ve  testiranj.
- Vedno uporabite ustnike ACE, ki so higieni no in posamezno zapakirani. Alkotest pri vsakem testiranju pride znotraj in zunaj v stik s  loveškimi izlo ki (pot, slina, kri itd.).
- Ko z naprave odstranujete ustnike, ki ste jih uporabljali za testiranje, uporabite rokavice. To velja predvsem takrat, ko so testiranje izvajale tuje osebe. ACE Technik (www.ace-technik.de) ima v svoji ponudbi ustrezne rokavice.

Pomembni napotki

-  e ste nekaj pojedli, pili alkohol ali pa pokadili cigareto, potem pred začetkom meritve po akajte najmanj 15 minut.
- Ta alkotest je kakovosten in občutljiv merilnik. Za ohranjanje merilne natan nosti senzorja je treba napravo redno uporabljati.  e naprave dalj  asa ne uporabljate, se lahko senzor izsuši. Priporo amo, da alkotest najmanj 2 x mese no uporabljate za testiranje (tudi  e niste pili alkohola).
- Pri izmerjenih vrednostih pod 0,10 ‰ (ALI 0,01% BAC ALI 0,05mg/L – v odvisnosti od nastavitve) je prikazan rezultat testiranja 0,00 (‰ ALI mg/L ALI % BAC – v odvisnosti od nastavitve). To se zgodi iz tega razloga, ker so lahko pri nizki stopnji alkohola v izdihanem zraku tudi druge snovi, ki vplivajo na rezultat testiranja izdihanega zraka.
- S spremembami na izdelku se lahko spremenijo tudi opisani poteki v teh navodilih za uporabo. To se lahko zgodi brez vnaprejnega opozorila in prilagoditve navodil za uporabo in ne predstavlja vzroka za reklamacijo, vra ilo izdelka ali zmanj anje cene. Uporabnik je odgovoren za to, da prepozna odstopanja med navodili za uporabo in dejanskim upravljanjem alkotesta ter se ustrezno odzove.



Samo uporaba originalnih ustnikov ACE Instruments

- Zagotavlja natan ne merilne rezultate
- Zagotavlja 100 % zanesljivo higieno
- Vam omogo a uveljavljanje polne garancije za napravo

ACE Instruments opozarja

Tudi  e naprava prikazuje alkoholiziranost v „varnem“ obmo ju, to po u ivanju alkohola ni potrditev, da ste sposobni voziti vozilo ali pa opravljati kak no drugo dejavnost, ki je pod vplivom alkohola ni dovoljeno opravljati.

Opozorila

Prikaz	Pomen	Dejanje
	Akumulatorska baterija je prazna.	Prosimo, da akumulatorsko baterijo napolnite s pomo�jo prilo�enega USB-kabla. Opomba: Akumulatorska baterija bo imela dalj�o �ivljenjsko dobo, �e boste takrat, ko naprave ne uporabljate, stikalo za aktivacijo napajanja (na desni strani naprave) potisnili navzdol.
<i>Flo</i>	Senzor ni imel na voljo dovolj izdihanega zraka za analizo.	Pritisnite tipko za vklop in za�nite z novim testiranjem, pri katerem 5 sekund konstantno in brez premora pihate v ustnik (pihajte tako, kot da bi �vi�gali brez zvoka).
	Skupno �tevililo izvedenih testiranj izdihanega zraka je doseglo �tevililo 500. Napravo je treba kmalu kalibrirati, saj boste tako ohranili garancijo in merilno natan�nost.	�e �elitate, da prikaz "LOCK" (Zaklepanje) neha utripati in se naprava ponovno vrne v na�in obi�ajnega delovanja, se morate obrniti na trgovca, pri katerem ste kupili alkotest in ki bo poskrbel za kalibracijo naprave. Napravo lahko po�ljete na kalibracijo na naslov servisne slu�be, ki ga najdete na spletni strani www.alkomat.net .
<i>Err</i>	Senzorski modul je pokvarjen ali pa je treba zamenjati senzor.	Prosimo, da se obrnete na trgovca, pri katerem ste kupili napravo, oziroma na servisno slu�bo ACE Instruments (www.alkomat.net).

Kalibracija

ACE Instruments priporo a kalibracijo senzorja, ki je vgrajen v napravi, pribli no vsakih 12 mesecev oziroma po 500 testiranjih (v odvisnosti od tega, kaj nastopi prej). Kalibracija ni nujno potrebna, vendar se natan nost vgrajenega senzorja brez kalibracije ves  as zmanj uje. Poleg tega v primeru, da se ne dr ite intervalov za kalibracijo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije za senzor. Napravo lahko po ljete na kalibracijo na naslov servisne slu be, ki ga najdete na spletni strani www.alkomat.net.

Priporo amo, da napravo po ljete kot paketno po iljko, tako da imate v primeru izgube po iljke dokazilo o po iljanju.

Napotki glede baterije

Naprava, na katero se nanašajo ta navodila za uporabo, ob nakupu vsebuje 3,7 V litijevo-ionsko akumulatorsko baterijo. To akumulatorsko baterijo lahko ponovno napolnite do 200-krat. Akumulatorska baterija bo imela daljšo življenjsko dobo, če boste takrat, ko naprave ne uporabljate, stikalo za aktivacijo napajanja (na desni strani naprave) potisnili navzdol.

Če je baterija pokvarjena ali pa je ni več možno ponovno napolniti, potem napravo pošljite na naslov servisne službe, ki je naveden na spletni strani www.alkomat.net. Naprave nikakor ne odpirajte na lastno pest in ne poskušajte sami zamenjati baterije. Proizvajalec ACE Instruments opozarja, da v tem primeru izgubite pravico do uveljavljanja zakonsko predpisane garancije.

Tehnični podatki*

Senzor	Elektrokemični senzor
Natančnost	+/- 0,08 ‰ pri 0,50 ‰ in 25 °C (promil = osnovna nastavitev) ALI +/- 0,08% BAC pri 0,05 % BAC (% BAC = ZDA) in 25 °C ALI +/- 0,04 mg/L pri 0,25 mg/L (mg/L = Velika Britanija) in 25 °C
Podatek o koncentraciji alkohola v krvi	0,000-4,000 ‰ (promil = osnovna nastavitev) ALI 0,000-0,400 % BAC (merska enota za ZDA) ALI 0,000-2,000 mg/L (merska enota za Veliko Britanijo)
Čas segrevanja	15-30 sekund (pri 0,5 promila, višja kot je izmerjena vrednost promilov, bolj dolgo potrebuje senzor za izparevanje vsebnosti alkohola, ki je izmerjen v izdihanem zraku)
Mere naprave	(V x Š x G) 110 x 53 x 19 mm
Teža	82 gramov (z baterijo)
Napajanje	3,7 V litijevo-ionska akumulatorska baterija tipa AA (ko je popolnoma napolnjena, energija zadostuje za do 80 testiranj)
Temperatura pri delovanju	0 °C do 55 °C
Temperatura pri shranjevanju	0 °C do 55 °C
Kalibracija	Vsakih 12 mesecev ali po 500 testiranjih (v odvisnosti od tega, kaj nastopi prej). Napravo lahko pošljete na kalibracijo na naslov servisne službe, ki ga najdete na spletni strani www.alkomat.net .

* Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov za funkcionalne izboljšave brez vnaprejšnje najave.

Varnostni napotki

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starej i od 8 let, in osebe z zmanj animi fizi nimi, senzori nimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izku enj in znanja,  e jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadol ena za njihovo varnost, ali so prejeli navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlaj ih od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati  iš enja in vzdr evanja naprave, razen  e so starej i od 8 let in pod nadzorom.

Garancija in odgovornost

Garancija:

Podjetje ACE Handels- und Entwicklungs GmbH za izdelek, kateremu je prilo ena ta izjava o garanciji in odgovornosti, v vseh razli icah in poimenovanjih, nudi enoletno garancijo od datuma nakupa na napake v materialu in obdelavi ter na senzor. Ta garancija vklju uje elektroniko in ohi je oz. se nana a na senzor brez komponent za jemanje vzorca. Garancija ne velja za komponente, ki se ob njihovi u inkovitosti samodejno uni ijo (npr. varovalke). Garancija velja od datuma dostave ali od datuma prve uporabe (velja kraj e  asovno obdobje), v kolikor to ni druga e navedeno v dokumentaciji, ki jo je izdelku prilo ilo podjetje ACE Handels- und Entwicklungs GmbH.

Omejitev garancije in odgovornosti:

Omejitve glede izdelka:

Podjetje ACE Handels- und Entwicklungs GmbH ne nudi kakr nekoli nadaljnje eksplicitne ali implicitne garancije vklju no z mo nostjo prodaje in primernostjo za dolo en namen.

Garancija ne velja zlasti za kalibracijo. Po menjavi sensorja je kalibracija nujno potrebna.  e sta pri izdelku potrebna menjava sensorja in/ali kalibracija, potem lahko uporabnik prejme predra un. V kolikor uporabnik zavrne predra un, potem podjetje ACE Handels- und Entwicklungs GmbH izdelek po lje nazaj v nepopravljenem/nekalibriranem stanju, izdelek pa je tudi ustrezno ozna en.  e izdelek ne izpolnjuje pogoje za uveljavljanje te garancije, potem so zahteve kupca in dol nosti podjetja ACE Handels- und Entwicklungs GmbH omejene na zamenjavo ali popravilo zadevnega blaga ali na vra ilo kupnine za reklamirano blago izklju no in po lastni presoji podjetja ACE Handels- und Entwicklungs GmbH.

ACE, proizvajalec: ACE Handels- und Entwicklungs GmbH, Staufenstr a e 1, 83395 Freilassing, Nem cija.

Omejitve glede uporabe:

Podjetje ACE Handels- und Entwicklungs GmbH v nobenem primeru ne odgovarja za dodatno  kodo, naključno  kodo ali posledično  kodo, kot so med drugim izgubljeni dobi ci in izpad uporabe, ki so posledica prodaje, proizvodnje ali uporabe izdelkov, ki se prodajajo v okviru te izklju itve odgovornosti, ne glede na to,  e ti zahtevki izhajajo iz pogodb, malomarnosti ali drugih krivdnih dejanj.

Izdelek, kateremu je prilo ena ta izjava o garanciji in odgovornosti, ne glede na to, v kateri razli ici ali s kak nim poimenovanjem, se ne more zlasti pravno zavezujo e uporabljati za ugotavljanje,  e je oseba sposobna voziti vozilo ali izvajati dejanje, ki pod vplivom alkohola vodi do lastne ogro enosti in do ogro enosti tujih oseb.

Obvezni pogoji za to garancijo so skrbno preverjanje vseh izdelkov ob prejemu,  e morda opazite znake po kodbo, kalibracija, ki je primerna za uporabo s strani kupca, in predvidena uporaba, vzdr evanje in servisiranje v skladu z napotki v dokumentaciji, ki jo je izdelku prilo ilo podjetje ACE Handels- und Entwicklungs GmbH. Vzdr evanje ali servisiranje s strani neusposobljenega osebja prav tako vodita do izgube pravice do uveljavljanja garancije, to pa velja tudi za uporabo nedovoljenega potro nega materiala ali rezervnih delov. Tako kot pri vseh tehni no zahtevnih izdelkih je bistvena zahteva, ki je obvezno potrebna za garancijo podjetja ACE Handels- und Entwicklungs GmbH, da so vsi uporabniki teh izdelkov seznanjeni z uporabo, funkcijami in omejitvami izdelka, ki so opisane v prilo eni dokumentaciji k izdelku.

Omejitve glede svetovanja:

Kupec potrjuje, da je na lastno odgovornost preveril nameravano uporabo in primernost kupljenega blaga za vsak namen uporabe. Obe strani se izrecno dogovorita, da je bilo vsako tehni no ali drugo svetovanje s strani podjetja ACE Handels- und Entwicklungs GmbH glede uporabe blaga ali storitev brezpla no in na izklju no tveganje kupca. Iz tega razloga podjetje ACE Handels- und Entwicklungs GmbH ne prevzema nobenih zadol itev ali odgovornosti za priporo ila in njihove rezultate.

ACE Handels und Entwicklungs GmbH
Staufenstr a e 1 / Hallen 12 - 14
D-83395 Freilassing
Nem cija

Tel.: +49(0)8654 / 77 953-31
Faks: +49(0)8654 / 77 99 694

Elektronska po ta: info@alkomat.net
Spletna stran: www.alkomat.net





Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Alkotest ACE Innomark Gamma**
Kat. št.: **23 45 266**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.